

Principper for katalog med APV- og forflytningshjælpemidler

I Næstved kommune har vi undtaget en del af de gængse APV-hjælpemidler for almindelig visitation, fordi vi har erfaring for at de håndteres effektivt og kompetent i organisationen. Derfor rekviderer leverandørerne disse direkte ved depotet. Vi ønsker at lægge flest muligt af disse hjælpemidler i katalogerne, for at understøtte en effektiv hverdag.

Større og mere komplekse og ukendte hjælpemidler / velfærdsteknologiske løsninger egner sig ikke i samme grad til kataloger. De er kendetegnet ved at have mindre målgrupper, som også oftest ikke er fastlagte, og ved at være dyre i indkøb. Organisationens har ikke samme erfaring i anvendelsen af dem, hvorfor det ikke understøtter effektivitet at lægge dem i katalog.

Disse hjælpemidler / velfærdsteknologiske løsninger vurderer vi, at der er behov for at udrede og bevilge via en visitator. Det betyder ikke, at vi ikke kan levere dem, vi underkaster dem blot visitation. Det betyder også, at vi sørger for at vedligeholde den viden som skal til at kunne vurdere om netop det givne hjælpemiddel eller den velfærdsteknologiske løsning, er en velegnet løsning i en konkrete situation. Såfremt dette er vurderingen, leveres dette. Vi sørger således for at myndigheden har tilstrækkelig erfaring og viden til at kunne gå i dialog med leverandørerne herom. Dialog indbefatter både ressourcerne til at bistå med afdækning af muligheder, afprøvning og teknisk viden til at vejlede.

Vi vil kontinuerligt vurdere alle teknologiske løsninger mhp at målgruppespecificere dem, for at kunne anvende dem med succes. Succes betyder, at vores organisation har erfaring i anvendelsen, at vi kan målgruppespecialisere alle teknologiske løsninger, og at vi har vurderet i hvilke situationer vi anvender dem. I vurderingen indgår overvejelser om omkostninger og hvilken ressourceminimering anvendelsen bevirker, konsekvenser for arbejdsmiljøet og forankring i organisationen. Sidstnævnte resulterer i arbejdsgangsbeskrivelser således at anvendelsesgraden er optimeres.

Fordi den teknologisk udvikling er fortløbende, vil vi fortløbende vurdere hvilke effekter som bør indgå i katalogerne. Vurderingen forankres på tværs af drift og visitation, således at alle tænkelige overvejelser bringes til vurdering.

APV-katalog Forflytningsvejledere, Terapeuter og Teamleder

Standard APV-redskaber og forflytningshjælpemidler, som kan bestilles direkte på Hjælpemiddeldepotet via Nexus

Toiletsæde m. armlæn (ingen forhøjelse) VIGTIGT Toilet skal være rengjort før opsætning/nedtagning Kan ikke anvendes på væghængte toiletter	Supporter HMI:12094 
Toiletforhøjer (fast) - med armlæn Forhøjelse: 6 cm VIGTIGT Toilet skal være rengjort før opsætning/nedtagning Kan ikke anvendes på væghængte toiletter	HILOO -6 cm forhøjelse HMI:16095  Det skal noteres hvis den ikke skal leveres med armlæn.
Toiletforhøjer (fast) - med armlæn Forhøjelse: 10 cm VIGTIGT Toilet skal være rengjort før opsætning/nedtagning Kan ikke anvendes på væghængte toiletter	HILOO -10 cm forhøjelse HMI:16096  Det skal noteres hvis den ikke skal leveres med armlæn.

Badetaburet Sædebredde: 47 cm Sædedybde: 33,5 cm Indstillingshøjde: 43-58,5 cm Max brugervægt: 150kg Total bredde: 56,5 cm	Badetaburet Aqua med PUR sæde HMI 46565 
Ryglæn til badetaburet	Ryglæn til badetaburet HMI 49933 
Swift fritstående toiletstol Toiletforhøjer der kan anvendes til væghængte toiletter Kan også benyttes til at stille ved senge. HUSK at bestille bækken med. Indstillingshøjde 42-57 cm Bredde mellem armlæn 54 cm Max brugervægt 130 kg	Swift fritstående toiletstol HMI 44430 
Bade-toiletstol m. hjul SB: 45.5 cm SD: 45 cm SH: 48 – 60 cm Max brugervægt: 150kg Udvendig bredde: 56,5cm Leveres med toiletspand og fodstøtter	Aquatech Ocean Ergo HMI 109123 

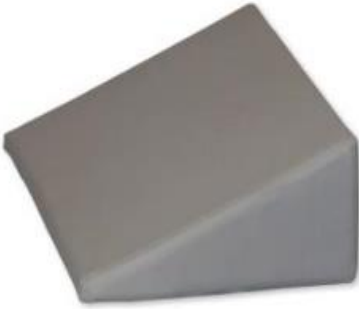
Toilet-badestole med sædetilt Uden hydraulisk /elektrisk højdeindstilling SB: 45 cm SD: 45 cm SH: 50 – 60 cm Max brugervægt: 150kg Udvendig bredde: 56cm Leveres med toiletpand og fodstøtter	Aquatech Ocean Vip Ergo HMI 109127 
Toilet-badestol med el-kip og el-hejs SB: 43 cm SD: 43 cm SH: 54-92,5 cm Max brugervægt: 130kg Udvendig bredde: 60cm Vigtigt Ved bestilling SKAL der angives dørbredde for at sikre at bade-toiletstolen kan komme gennem dør til baderum.	Butterfly. HMI 139405 Elektrisk Toilet-badestol med el-kip og el-hejs 
Dropstativ Højdeindstilling Max. 210cm Min. 120cm	Dropstativ HMI 31799 

Elektrisk Plejeseng med 3-4 motorer og centralbremse Leveres med: • Sengehest x2 (metal) Max brugervægt: 200 kg Mål - liggeflade Længde: 200 cm Bredde: 83 cm Liggeflade/indstillingshøjde: 35-82cm Sengebord, madras og sengehestbeskyttere skal bestilles på særskilt HMI.nr. Vigtigt Bestiller skal oplyse et telefonnummer til den person der skal koordineres levering med. <u>HUSK at bestille madras</u> Ved udlevering skal der være gjort plads til sengen, og der skal være mulighed for at tilslutte sengen til stikkontakt. Det er bestilles ansvar, at der er gjort plads til modtagelse af sengen. Sengegalge skal bestilles gennem visitationen Brug af sengegalge kan være kontraindiceret til nogle borgere / diagnoser	Scanbed 755D HMI 106068 
---	---

Trykaflastende / vekseltryks-madras Trykaflastende for sår: til og med "stadie 4" Vigtigt: <u>Skal</u> placeres direkte på sengebunden. <u>Må ikke</u> udleveres/opsættes uden forudgående trykscoring <u>Må ikke</u> anvendes til personer med osteoporose Leveres med vaskbart inkontinensbetræk. Max. Brugervægt 200kg Driften har opgaven med at lægge madras i sengen indstille den.	Cobi Cura X10 HMI 114858  The image shows a dark blue, rectangular pressure-relieving mattress (Cobi Cura X10) lying flat. A small, white, rectangular electronic control unit is positioned in front of the mattress. The mattress has a textured surface and some text on it, including the brand name 'Cobi'.
Standard Madras Trykforebyggende op til "stadie 2" Mål 83x200x14 cm Max brugervægt 150kg. Leveres med vaskbart Inkontinensbetræk	Dacapo Excel HMI 135496  The image shows a blue, rectangular pressure-relieving mattress (Dacapo Excel) with a wavy, ergonomic shape. It has a light blue, ribbed surface on one side and a darker blue surface on the other. The brand name 'Dacapo' is visible on the blue surface.

Sengehestbeskyttere (overtræk til metal sengehest) Polstret Vigtigt: Bestilles enkeltvis	Sengehestovertræk HMI 62664 
Sengestøttegreb til plejeseng Kan anvendes i stedet for sengehest Højde: 40cm Længde: 30cm Vigtigt: Kan ikke anvendes sammen med sengehest	Sengestøttegreb HMI 35490 
Sengebord Bevilges / anvendes kun til APV Højde Max. 100cm Min. 65cm Max. Belastning 20kg	Sengebord med bordplade af plast HMI 50253 
Hårvaskebakke oppustelig Luftfyldt hårvaskebakke med 2 kamre Mål: Dybde: 58,5 cm Bredde: 66 cm Højde: 16 cm	Hårvaskebakke HMI 19794 

Lejringspuder Vigtigt: Kun hvis borgerens egne puder IKKE kan anvendes. Bredde 40 cm Længde 60 cm Leveres med soft vaskbart betræk Vigtigt: Bestilles enkeltvis	LeanOnMe Basic Lejringspude HMI 129660 
Mavekile / Lejringskile Bredde 25 cm Længde 30 cm Højde 14 cm Anvendes primært når brugeren ligger i sideleje. Også velegnet til støtte ved hofte, ryg, arm eller fod. Leveres med vaskbart betræk. Bestilles enkeltvis	Master Comfort Mavekile HMI 102744 
Støttekile / Lejringskile Til understøttelse af fx lår i den siddende stilling Ex. Ved brug af MasterTurner Bredde 15 cm Højde 5 cm Længde 40 cm Leveres med vaskbart betræk Leveres i sæt af 2 stk.	Master Comfort Støttekile HMI 36382 

Rygpude Bredde 30cm Højde 15cm Længde 50cm Trekantet lejringspude, som kan benyttes f.eks.: Stabilisering bag ryggen i sideleje Stabilisering foran kroppen i sideleje Understøttelse af armen i sideleje Understøttelse af ben i side- og rygleje Lejring i vinkel på ca. 30 grader	LejreLet Wedge HMI 71864 
Vaskekile Rektangulær pude der benyttes i flere forskellige lejringssituationer og ved nedre hygiejne Bredde 30cm Højde 15cm Længde 50cm	LejreLet Pad Hign HMI 71865 
Sengebånd Max. Belastning 145kg Forsynet med håndtag og selve båndet er 4 cm bredt og 245 cm lang, som gør det muligt at indstille længden til det individuelle behov. Sengebåndet skal monteres i sengerammen	Sengebånd HMI 887 
Sengestige Sengestige i plast med nylonsnor. Håndtagsbredde 19,6 cm, Længde på sengestigen 150 cm. Max belastning: 114 kg	Sengestige / Rebstige HMI 28233 

Glidebræt Bredde 33 cm Længde 60 cm Max brugervægt 150 kg	Easy Glidebræt – Kort HMI 1505 
Forflytnings-plattform Brugervægt Max: 150 kg Vigtigt: Ved bestilling af Return skal det afklares om underlaget er egnet til at køre på. Gulvtæpper afmonteres inden installation af hjælpemidler Vigtigt: Bælte SKAL anvendes når der køres med borgeren på Return	Return HMI 78952 
Bælter til Return Størrelse / hoftemål: Small / 85-105 cm Medium / 105-125 cm Large / 120-145 cm X-Large / 140-165 cm	Bælte til Return Small – HMI 40394 Medium – HMI 40395 Large – HMI 40396 XLarge – HMI 54029 

Forflytnings-plattform Anvendes indendørs for korte forflytning. For bruger der kan stå, men kan ikke nødvendigvis gå. Brugervægt Max: 182 kg Vigtigt: Ved bestilling af forflytningsplatform skal det afklares om underlaget er egnet til at køre på. Gulvtæpper afmonteres inden installation af hjælpemidler	Sara Stedy HMI 65044 
Stålift Brugervægt Max: 160 kg Oplys borgervægt ved bestilling <u>Må ikke anvendes til personer med osteoporose</u> Vigtigt Ved bestilling af stålift, skal der afklares om der er tilstrækkelig arbejdsplads til anvendes af ståliften og om underlaget er egnet til køre på. Gulvtæpper afmonteres inden installation af hjælpemidler For bestilling af sejl -se sejlkatologet	Mobil stålift HMI 79632 

Personlift

Brugervægt
Max: 180 kg.

Oplys borgervægt ved bestilling

Vigtigt

Ved bestilling af personlift, skal der afklares om der er tilstrækkelig arbejdsplads til anvendes af personliften og om underlaget er egnet til køre på.

Det anbefales at gulvtæpper mv. afmonteres inden installation af hjælpemidler

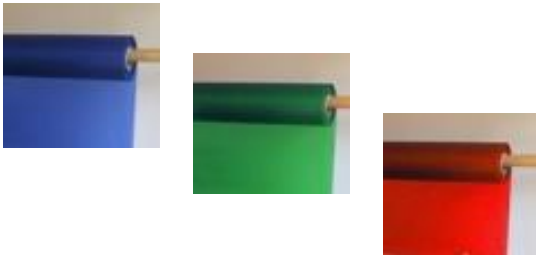
Bemærk at der er forskellige modeller, men at anvendelse af løftesejl er det samme.

For bestilling af sejl – se sejlkataloget

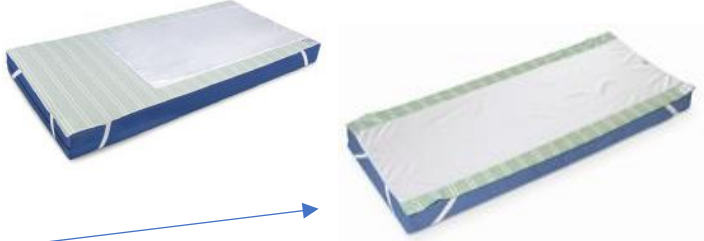
Mobil personlift HMI 108838

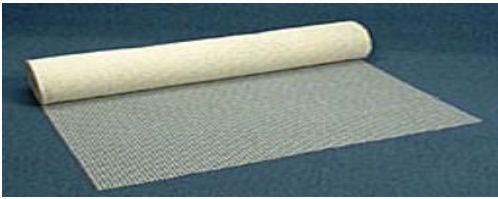


Stationær personlift (loftslift) Monteres enten i loft, vægge eller på stativ Brugervægt Max. 200 kg. Vigtigt: Der kan kun bestille 1 loftslift. Ved yderligere behov skal der rettes henvendelse til visitation hjælpemidler Vigtigt: Det er TL's ansvar at der forud for bestilling af loftslift er taget stilling til placeringen og at borger er orienteret om dette. Vigtigt: Se arbejdsgangsbeskrivelse for bestilling (i KVAS) Bemærk at der er forskellige modeller, men at anvendelse af løftesejl er det samme. For bestilling af sejl – se sejlkataloget	Loftslift HMI 71819 
Løftesejl Bestilling af løftesejl dokumenteres i Nexus. Vær opmærksom på at personalet altid skal tjekke et sejl før det anvendes. Er sejlet i stykker eller slidt skal det udskiftes. Se separat katalog for løftesejl	

Multibånd – standard Multibåndet er udviklet til behov for at løfte og holde arme, ben eller andre kropsdele. Mål Bredde 10cm Længde 15,4cm	Multibånd HMI 51048 
Spilerdug (glidestykke) Bemærk at spilerdug leveres i ruller af 50 m Farvekode: Blå eller Grøn anvendes til forflytning Rød anvendes primært til påklædning Forflytningsvejlederne bestiller til centrene, som der klippes stykker af til borgerne	Spilerdug HMI: Blå 31700 Grøn 47759 Rød 47765 

Forflytningslagen med håndtag til brug ved forflytningsopgaver i seng. Kan anvendes ved brug af loftlift/mobillift. Forflytningslagenet skal anvendes sammen med spilerdug Max. Brugervægt 200 kg Spiler Forflytningslagen Kort Længde 140 cm Bredde 145 cm Spiler Forflytningslagen Lang Længde 240 cm Bredde 145 cm	Spiler+ Kort HMI: 101928  Spiler+ Long HMI:101927 
Glidelagen SatinSheet 2Direction Max. brugervægt 300 kg Længde 200 cm Bredde 85cm (Glid 65x140) Anvendes til borgere der er selvhjulpne.	SatinSheet 2Direction HMI: 124474 

Vendesystem (ikke polstret) Til borgere hvor det er nødvendigt at ligge på glidesystemet hele tiden f.eks. af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø eller smerteprægede borgere. Fås med og uden stropper Bundstykke / Lagen <u>Model Midi</u> Glid 65x140 cm <u>Model Maxi</u> Glid 65x 200 cm Trækstykke Længde 140cm Trækstykket gør det muligt at flytte/trække borgeren i alle 4 retninger Leveres som standard med håndtag til mulighed for vending med lift. Husk at bestille både bundstykke og trækstykke	SatinSheet Bundstykke - Lagen Midi: HMI 124474 Maxi: HMI 49342  Trækstykke Længde 140 cm HMI 103780 
Vendesystem – Polstret Vendesystem til borgere hvor der kan være behov for at anvende liften til vendingen Anvendes hvor SatinSheet ikke fungerer Max. Brugervægt 200 kg Madrascover Længde: 200 cm Bredde: 88 cm Vendelagen (top) Længde: 200 cm Bredde: 150 cm VIGTIGT Husk at bestille begge dele	MasterTurner Combi Vendesystemet består af Madras Cover med 3 glidezoner + vendelagen Madrascover med 3 glidezoner (Master Vario Cover) HMI: 114967  Vendelagen (Master Turner Soft Combi) HMI: 114966 

Vendesystem – Polstret, med 3 glidezoner og 2-delt vendelagen Til borgere hvor det er nødvendigt at ligge på vendesystemet, og hvor SatinSheet ikke fungerer Vendesystem til borgere hvor der er behov for at anvende liftten til vendingen OG hvor liftten anvendes til at holde borgeren liggende på siden. Max. brugervægt 200 kg Madrascover Længde: 200 cm Bredde: 88 cm Vendelagen (top) Længde: 100 cm Bredde: 150 cm Vendelagen (bund) Længde: 160 cm Bredde: 150 cm VIGTIGT Husk at bestille alle 3 dele	Master Turner Duo Madrascover (Master Vario Cover) HMI 114967  2 delt vendelagen (Master Turner Duo Soft) Top – HMI 49206 Bund – HMI 49207 
Nonslip Opgiv mål Forflytningsvejlederne bestiller til centrene, som der klippes stykker af til borgerne	Nonslip HMI: 50725 
Sling Sock Bruges ved på- og afmontering af sejl. Undgå unødigt løft af ben Alternativt anvendes Spilerdug. Vatteret og med glat inder- og yderside for at undgå friktion mod bar hud og dannelse af shear. Leveres i sæt a 2 stk.	Sling sock til sejl Medium HMI 48792 Large HMI 55707 

One man sling One Man Sling giver mulighed for at hjælpe ben op i seng Mål Bredde 7,5 cm Længde 270 cm	One man sling HMI 51606 
Benløfter Leg-up gør det lettere for borgeren at hæve, løfte og flytte sit ben. Den kan f.eks. anvendes af borgeren der lider af problemer med at komme ud af sengen og få tøj på. Kan også anvendes af borgeren der er opereret i benet eller lignende, da den ekstra brede løkke kan komme over gipsen. Mål Bredde 3 cm Længde 65 cm	Leg Up benløfter HMI 105470 
Hælaflaster Hælaflaster, der tilbyder komfort og 100 procent tryk aflastning for borgere med høj risiko for at udvikle tryksår på hæle. Vigtigt Hælaflasterne er et supplement til behandling af tryksår på hæl og/eller ankel.	Heel Pro Evolution standard HMI 85055 

Trykaflastende pude Anvendes i lænestol / sofa. OBS forhøjning lægges forrest og fordybning bagerst 45 x 44 x 6 cm Max brugervægt 120kg Vigtigt Trykaflastende pude til kørestol bestilles via visitator	Alova HMI 73856 
Luftrenser OBS Husk at oplyse borger om, at der er en egenbetaling på 250 kr. pr. mdr. Service varetages af forhandler Ved spørgsmål angående luftrenseren ring eller skriv til CG Healthcare på 24918080 jl@gchc.dk OBS Luftrenser bevilges til borger og placeres i borgers hjem. Luftrensere til fællesarealer er ikke borgerrelateret og udenfor hjælpemiddel-depotets budget.	Aigle AG 300 HMI: 132805 