

Det er forflytningsvejleder, fysio- og ergoterapeuter og visitator i Center for sundhed og ældre, der kan bestille standardsejl.

Vurdering af sejltypen og størrelse:

Vurdering foretages af forflytningsvejlederen eller anden medarbejder med faglig kompetence hertil (se vedlagt materiale).

Dokumentation:

Den der bestiller hjælpemidlet, er ansvarlig for dokumentationen.

I Nexus under "Tilstande" (fagligt notat)

Her beskrives tilstanden der ligger til grund for at borger har behov for dette hjælpemiddel.

F.eks. en beskrivelse af borgerens funktionsniveau der gør at borgeren har nok funktion til at anvende et toiletsejl/hygienest. Eller begrundelse for at borgeren skal have et netsejl og blive siddende på dette, samt vurdering af hvilken type netsejl.

Bestilling:

Bestilling af standardsejl skal ske til den konkrete borger via Nexus.

Er der behov for andre sejl end standardsejlene, skal der anmodes til visitationen via skema i Nexus.

Opfølgning:

Forflytningsvejlederen eller terapeut sikre opfølgning efter behov.

Alle ansatte er ansvarlige for, at sejl der ikke anvendes hos den enkelte borger, bliver returneret til Hjælpemiddeldepotet.

STÅLIFTSEJL

Winnicare brystsejl



Sejlet bruges sammen med en ståløfter og anvendes som hjælp til at komme op og stå. Anvendes siddende til og fra f.eks. seng, kørestol, bade- og toiletstol.

Sejlet er syet i quiltet polyester, hvilket gør sejlet meget blødt og behageligt at have på. Rygdelen er på indersiden forsynes med skridsikkert materiale. Desuden er der syet en bred elastik i ryggen, så sejlet bliver på plads under løftet. Der er monteret dobbelt spænde og velcro.

Stropperne er forsynet med farvekoder, der gør det nemt at placere dem ens, hver gang sejlene bruges.

Krav til borgerens funktionsniveau:

- Borgeren skal have ståfunktion og god balance.
- Borgeren skal kunne medvirke i forflytningen – forstå en instruktion i at læne sig lidt tilbage under løftet.
- Borgeren må ikke have osteoporose

Størrelse	HMI nr.
X-Small	72874
Small	72875
Medium	72876
Large	72877
X-Large	72878
XX-Large	72879

Armslynge til stålift

WinnCare



Hemiarmslyngen bruges ved forflytning i ståløfter, hvor den giver støtte til den lammede arm og derved skåner borgerens skulder.

Armslyngen kan sættes på forskellige måder, og den er indstillelig i højden.

HMI nr. 44584

LIKO – UNIVERSALSEJL

Model 00



Universalsejl giver en god siddestilling med støtte af hele ryggen op til nakken.

Armene holdes indenfor sejlet.

Universalsejl model 00 passer til de fleste løftesituationer og er et godt valg som basissejl.

Der findes også et Universalsejl model 02 som anvendes ved løft, hvor der er problemer med at få tilstrækkelig løftehøjde. Løfteøjjerne er minimerede og siddestillingen er lidt mere bagudlænet i forhold til standardmodellen. Ved behov for dette sejl skal I kontakte visitation via skema i Nexus.

Se skema vedr. sejlstørrelser.

Størrelse	HMI nr. Model 00
Small	16011
Medium	12392
Large	14670
X-large	19790

LIKO – ORIGINALSEJL

Med høj ryg / hovedstøtte og afstivede benstøtter

Model 200



Liko Originalsejl med høj ryg er egnet til borgere med nedsat hoved - og kropsstabilitet.

Støtter hele ryggen og hoved. Det giver en tilbagelænet siddestilling med hovedstøtte.

Egnet til løft fra liggende stilling og løft fra gulv.

Armene holdes indenfor sejlet.

Se skema vedr. sejlstørrelse.

Størrelse	HMI nr.
Small	3157
Medium	3160
Large	3163
X-large	3168

LIKO AMPUTATIONSSEJL

høj ryg



Model 75

Er udviklet til løft af brugere med højt amputerede ben, men er egnet til alle slags benamputationer. Sidestillingen er let tilbagelænet, hvorfor amputationssejlet også er egnet til brugere, som ikke må bøje over 90 i hofteleddet.

Ben stropperne placeres helt rundt under begge lårben. Konstruktionen med de særlige stropholdere i siden af løftesejlet sikrer ben stroppernes placering og gør, at åbningen til bagdelen ikke udvides, men bevares uforandret, hvilket øger sikkerheden ved løftet.

Armene holdes inden for løftesejlet.

Amputationssejlet kan sættes på og fjernes i siddende eller liggende stilling.

Se skema vedr. sejlstørrelser

Størrelse	HMI nr. med høj ryg
Small	35334
Medium	25801
Large	25800
X-large	38152

LIKO TOILETSEJL

Model 45



Toiletsejl er et løftesejl, som er designet for at lette af- og påklædning i forbindelse med løft til og fra toilet.

Toiletsejl er velegnet ved løft af personer med en vis stivhed i kroppen. En vis stabilitet i kroppen er nødvendig for at man skal sidde godt og sikkert i toiletsejlet. Toiletsejlet har en lidt mere tilbagelænet løftestilling end hygiejnevesten.

Ved brug af toiletsejl, skal følgende punkter vurderes før bestilling:

- Borgeren skal have muskelspænding i benene / kunne stemme fra
- Borgeren skal have en vis stivhed / stabilitet i kroppen
- Borgeren skal kunne medvirke i forflytningen / forstå hvad der foregår
- Borgeren skal kunne følge en instruktion
- Borgeren må ikke være urolig / lave uventede bevægelser
- Borgeren må ikke have osteoporose

OBS Det er vigtigt løbende at foretage ovenstående vurdering.

Se skema vedr. sejlstørrelser

Størrelse	HMI nr.
Small	34847
Medium	34848
Large	34849
X-large	34850

LIKO HYGIEJNEVEST



Model 55

Hygiejnevest er et løftesejl, som kan løse problemer ved løft til og fra toilet. Hygiejnevesten har en tætsluttende vest som løfter med en fast støtte om overkroppen.

Hygiejnevest er velegnet ved løft af personer med en vis stivhed i kroppen. En vis stabilitet i kroppen er nødvendig for at man skal sidde godt i hygiejnevesten.

Hygiejnevesten har en mere opretsiddende løftestilling end toiletsejlet.

Ved brug af hygiejnevest skal følgende punkter vurderes før bestilling:

- Borgeren skal have muskelspænding i benene / kunne stemme fra
- Borgeren skal have en vis stivhed / stabilitet i kroppen
- Borgeren skal kunne medvirke i forflytningen / forstå hvad der foregår
- Borgeren skal kunne følge en instruktion
- Borgeren må ikke være urolig / lave uventede bevægelser
- Borgeren må ikke have osteoporose

OBS. Det er vigtigt løbende at foretage ovenstående vurdering.

Se skema vedr. sejlstørrelser

Størrelse	HMI nr. Model 55 ekstra rygstøtte
Small	25223
Medium	25803
Large	28199
X-large	49329
XX-large	Findes ikke
XXX-large	Findes ikke

LIKO – UNIVERSALSEJL i polyesternet (Netsejl)

Model 00



Sejl i polyesternet kan anvendes til bad og til at sidde på.

OBS! Som udgangspunkt skal borger **ikke** sidde på sejl, men det beror på en konkret vurdering og kan være et behov hos f.eks. meget smertepregede borgere, udadreagerende borgere samt svært overvægtige borgere, hvor der ikke er plads til at komme til.

Den individuelle vurdering af, hvornår det er nødvendigt, at borgerne sidder på sejl, skal laves af forflytningsvejlederen og skal beskrives i handleplan.

Universalsejl giver en god siddestilling med støtte af hele ryggen op til nakken.

Armene holdes indenfor sejlet.

Universalsejl model 00 passer til de fleste løftesituationer og er et godt valg som basissejl.

Se skema vedr. sejlstørrelser.

Størrelse	HMI nr.
Small	17560
Medium	17564
Large	17568
X-large	43816

LIKO – ORIGINALSEJL

Med høj ryg / hovedstøtte i polyesternet (netsejl)

Model 200



Sejl i polyesternet kan anvendes til bad og til at sidde på.

OBS! Som udgangspunkt skal borger **ikke** sidde på sejl, men det beror på en konkret vurdering og kan være et behov hos f.eks. meget smerteprægede borgere, udadreagerende borgere samt svært overvægtige borgere, hvor der ikke er plads til at komme til.

Den individuelle vurdering af, hvornår det er nødvendigt, at borgerne sidder på sejl, skal laves af forflytningsvejlederen og skal beskrives i handleplan.

Liko Originalsejl med høj ryg er egnet til borgere med nedsat hoved - og kropsstabilitet.

Støtter hele ryggen og hoved. Det giver en tilbagelænet siddestilling med hovedstøtte.

Egnet til løft fra liggende stilling.

Armene holdes indenfor sejlet.

Se skema vedr. sejlstørrelse.

Størrelse	HMI nr.
MS	17581
Medium	1055
Large	1057
X-large	49382

LIKO – SKALSEJL

Polyesternet

Model 22



Sejl i polyesternet kan anvendes til bad og til at sidde på.

OBS! Som udgangspunkt skal borger **ikke** sidde på sejl, men det beror på en konkret vurdering og kan være et behov hos f.eks. meget smerteprægede borgere, udadreagerende borgere samt svært overvægtige borgere, hvor der ikke er plads til at komme til.

Den individuelle vurdering af, hvornår det er nødvendigt, at borgere sidder på et sejl, skal laves af forflytningsvejleder og skal beskrives i handleplan.

Skalsejlet er et smidigt løftesejl, som tilpasser sig kroppen og optager minimal plads i kørestolen. Det har indstillelig hovedstøtte og støtter hele kroppens længde. Bruger kan frit vælge at have armene inden for eller uden for sejlet under løftet.

Siddestillingen er let tilbagelænet af hensyn til brugere med nedsat kropsbalance. Velegnet til formstøbte stole.

Se skema vedr. sejlstørrelse.

Størrelse	HMI nr.
Medium	17536
Large	35331

LIKO – KOMFORTSEJL

Med høj ryg og afstivet hovedstøtte i polyesternet

Model 350 uden hygiejneåbning



Komfortsejl, er en sejlttype med udelt benstøtte som pålægges i liggende stilling og brugeren bliver siddende på sejlet i stolen eller på toilettet. Sejlet tilpasser sig efter brugeren uden behov for individuelle indstillinger. Komfortsejl er velegnet til brugere, som er særligt følsomme pga. smerter eller ledbesvær.

OBS! Har borger glæde af at benytte et komfortsejl, skal man være opmærksom på at bestille et ekstra sejl i forhold til toiletbesøg. Enten et med hygiejneåbning eller et sejl med delte benstroppe.

Se skema vedr. sejlstørrelse.

Størrelse	HMI nr.
Medium	49555
Large	49556
X-large	49557

Guldmann - Sit-On Comfort High Hygiejne

(erstatte tidligere komfortsejl hygiejneåbning fra Liko/Botved)



Sit-On Comfort High Hygiene
med hygiejneåbning

Sit-On Comfort High Hygiene er et hygiejnesejl med åben bund, der kan anvendes ved løft af personer i forbindelse med hygiejne opgaver og toiletbesøg.

Det anbefales ikke at efterlade sejlet under borgeren i kørestol pga risiko for tryk omkring den åbne bund.

Størrelse	HMI nr. Med hygiejne åbning
Small	102562
Medium	102563
Large	102564
X-large	102565