

Procedure vedr. bestilling af standardsejl

Vurdering af sejltype og størrelse:

Vurdering foretages af forflytningsvejlederen eller anden medarbejder med faglig kompetence hertil.

Dokumentation:

Den der bestiller hjælpemidlet, er ansvarlig for dokumentationen.

I Nexus under Funktionsevne tilstand "Forflytte sig"

Her beskrives tilstanden der ligger til grund for at borger har behov for dette hjælpemiddel.

F.eks. en beskrivelse af borgerens funktionsniveau der gør at borgeren har nok funktion til at anvende et toiletsejl/hygiejnevest. Eller begrundelse for at borgeren skal have et netsejl og blive siddende på dette, samt vurdering af hvilken type netsejl.

Bestilling:

Bestilling af standardsejl skal ske til den konkrete borger via Nexus.

Ved behov for andre sejl end standardsejlene anmodes visitationen, som ved øvrige hjælpemidler udenfor katalog.

Opfølgning:

Den enkelte medarbejder skal tjekke sejlet før hvert brug (se instruks sejl)


Hvis sejlet er beskadiget, må det ikke anvendes. Dokumenter i Nexus

(observationsnotat) og kontakt forflytningsvejleder for bestilling af nyt sejl.

Alle ansatte er ansvarlige for, at sejl der ikke anvendes hos den enkelte borger, bliver returneret til Hjælpemiddeldepotet.

Forflytningsvejlederen eller terapeut sikre opfølgning efter behov.

Winncare - brystsejl Ståliftsejl

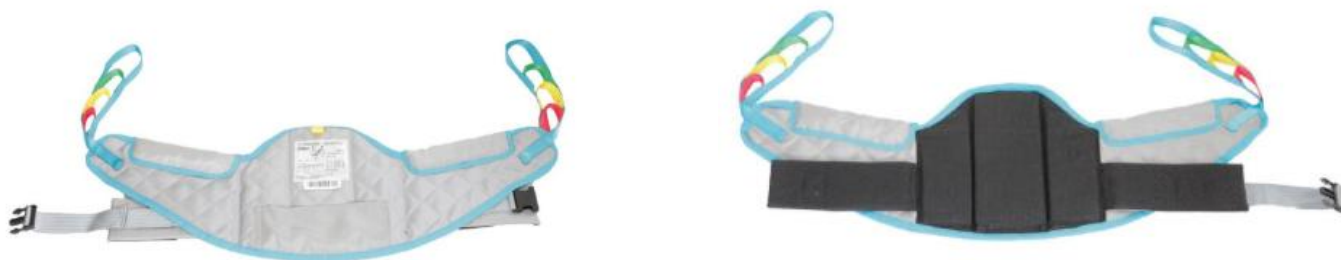

Sejlet bruges sammen med en ståløfter og anvendes som hjælp til at komme op og stå. Anvendes siddende til og fra f.eks. seng, kørestol, bade- og toiletstol.

Sejlet er syet i quiltet polyester, hvilket gør sejlet meget blødt og behageligt at have på. Rygdelen er på indersiden forsynes med skridsikkert materiale. Desuden er der syet en bred elastik i ryggen, så sejlet bliver på plads under løftet. Der er monteret dobbelt spænde og velcro.

Stropperne er forsynet med farvekoder, der gør det nemt at placere dem ens, hver gang sejlene bruges.

Krav til borgerens funktionsniveau:

- Borgeren skal have ståfunktion og god balance.
- Borgeren skal kunne medvirke i forflytningen – forstå en instruktion i at læne sig lidt tilbage under løftet.
- **Borgeren må ikke have osteoporose**

Størrelse	HMI nr.
X-Small	72874
Small	72875
Medium	72876
Large	72877
X-Large	72878
XX-Large	72879

Armslynge til ståløft

WinnCare



Hemiarmslyngen bruges ved forflytning i ståløfter, hvor den giver støtte til den lammede arm og derved skåner borgerens skulder.

Armslyngen kan sættes på forskellige måder, og den er indstillelig i højden.

HMI nr. 44584

Guldmann – Basic Basic (Universal sejl)



Basic Basic sejlet er et støttende og funktionelt universalsejl, der passer til mange forskellige borger og løfteformål. Sejlet støtter hele kroppen – dog ikke hovedet.

Basic Basic sejlet er velegnet til løft, forflytninger og positionering af personer med kontrol over hovedet, men med nedsat kontrol i overkroppen. Sejlet kan bruges til de fleste slags løft- og forflytninger til og fra siddende og halvt siddende stilling - f.eks. fra seng og kørestol - hvor borgeren ikke har behov for hjælp til at støtte hovedet. Basic Basic sejlet passer til de fleste løftesituationer.

Se skema vedr. sejlstørrelser

Størrelse	HMI nr.
Small	25458
Medium	25363
Large	25540
X-large	25541

Guldmann – Basic High

Med høj ryg / hovedstøtte



Basic High er et helsejl, der er velegnet til løft, forflytning og positionering af personer, der ikke har kontrol over hovedet og overkroppen. Basic High er et fuldt støttende helsejl, der støtter hele kroppen samt hovedet.

Det betyder, at Basic High sejlet kan bruges til løft og forflytninger til og fra liggende stilling fra f.eks. seng og gulv og ligeledes ved løft til og fra siddende stilling - f.eks. fra seng og kørestol.

Se skema vedr. sejlstørrelse

Størrelse	HMI nr.
Small	83596
Medium	83597
Large	83598
X-large	83599

Guldmann - Custom Amputee

Amputationssejl - Lav ryg



Amputee sejlet benyttes ved løft og forflytning af personer, der har en ensidig eller dobbeltsidig amputation over knæled eller til løft af personer, hvor begge ben er helt bortamputeret. Amputationssejlet støtter hele kroppen op til og med skulderpartiet samt omkring bækkenet.

Ben stropperne placeres helt rundt under begge lårben. Konstruktionen med de særlige stropholdere i siden af løftesejlet sikrer ben stroppernes placering og gør, at åbningen til bagdelen ikke udvides, men bevares uforandret, hvilket øger sikkerheden ved løftet.

Se skema vedr. sejlstørrelser

Størrelse	HMI nr.
Small	25545
Medium	25514
Large	25546
X-large	65147

Liko - Toiletsejl

Model 45



Toiletsejl er et løftesejl, som er designet for at lette af- og påklædning i forbindelse med løft til og fra toilet.

Toiletsejl er velegnet ved løft af personer med en vis stivhed i kroppen. En vis stabilitet i kroppen er nødvendig for at man skal sidde godt og sikkert i toiletsejlet. Toiletsejlet har en lidt mere tilbagelænet løftestilling end hygiejnevesten.

Ved brug af toiletsejl, skal følgende punkter vurderes før bestilling:

- Borgeren skal have muskelspænding i benene / kunne stemme fra
- Borgeren skal have en vis stivhed / stabilitet i kroppen
- Borgeren skal kunne medvirke i forflytningen / forstå hvad der foregår
- Borgeren skal kunne følge en instruktion
- Borgeren må ikke være urolig / lave uventede bevægelser
- Borgeren må ikke have osteoporose

OBS Det er vigtigt løbende at foretage ovenstående vurdering.

Se skema vedr. sejlstørrelser

Størrelse	HMI nr.
Small	34847
Medium	34848
Large	34849
X-large	34850

Liko - Hygiejnevest

Model 55



Hygiejnevest er et løftesejl, som kan løse problemer ved løft til og fra toilet
Hygiejnevesten har en tætsluttende vest som løfter med en fast støtte om overkroppen.

Hygiejnevest er velegnet ved løft af personer med en vis stivhed i kroppen. En vis stabilitet i kroppen er nødvendig for at man skal sidde godt i hygiejnevesten.

Hygiejnevesten har en mere opretsiddende løftestilling end toiletsejlet.

Ved brug af hygiejnevest skal følgende punkter vurderes før bestilling:

- Borgeren skal have muskelspænding i benene / kunne stemme fra
- Borgeren skal have en vis stivhed / stabilitet i kroppen
- Borgeren skal kunne medvirke i forflytningen / forstå hvad der foregår
- Borgeren skal kunne følge en instruktion
- Borgeren må ikke være urolig / lave uventede bevægelser
- Borgeren må ikke have osteoporose

OBS. Det er vigtigt løbende at foretage ovenstående vurdering.

Se skema vedr. sejlstørrelser

Størrelse	HMI nr. Model 55 ekstra rygstøtte
Small	25223
Medium	25803
Large	28199
X-large	49329

Guldmann – Basic Shell (netsejl)



OBS! Som udgangspunkt skal borger **ikke** sidde på sejl, men det beror på en konkret vurdering og kan være et behov hos f.eks. meget smerteprægede borgere, udadreagerende borgere samt svært overvægtige borgere, hvor der ikke er plads til at komme til.

Den individuelle vurdering af, hvornår det er nødvendigt, at borgere sidder på et sejl, skal laves af forflytningsvejleder og skal beskrives i handleplan.

Basic Shell er et helsesejl, der kan anvendes ved løft og forflytning af personer med nedsat kontrol over deres krop og hoved. Basic Shell støtter hele kroppen og hovedet med mulighed for at have armene uden for sejlet.

Basic Shell sejlet bruges ved løft til og fra liggende stilling (seng, gulv mv) og ligeledes ved løft til og fra siddende stilling. Løftesejlet er lavet af netvævet polyester, der er et let og luftigt materiale, og derfor kan blive under borgeren i kørestolen ligesom det er velegnet som badesejl.

Se skema vedr. sejlstørrelse

Størrelse	HMI nr.
Small	82196
Medium	82197
Large	82198
X Large	82199

Guldmann - Sit-On High II



Som udgangspunkt skal borger **ikke** sidde på sejl, men det beror på en konkret vurdering og kan være et behov hos f.eks. meget smerteprægede borgere, udadreagerende borgere samt svært overvægtige borgere, hvor der ikke er plads til at komme til.

Den individuelle vurdering af, hvornår det er nødvendigt, at borgere sidder på et sejl, skal laves af forflytningsvejleder og skal beskrives i handleplan.

Sit-On High II sejlet er udformet til at løfte og forflytte borgere, der efter en konkret vurdering skal blive siddende i sejlet.

Sejlet støtter borgerens lår og ryg. Designet forhindrer, at lårbenene roteres indad under løft.

Den justerbare hovedstøtte kan foldes ned, når borgeren forbliver siddende i sejlet eller efter behov.

OBS: Har borger glæde af at benytte et sit-on sejl, skal man være opmærksom på at bestille et ekstra sejl i forhold til toiletbesøg. Enten et med hygiejneåbning eller et sejl med delte benstroppe.

Se skema vedr. sejlstørrelse

Størrelse	HMI nr.
Small	114497
Medium	114500
Large	114503
X-large	114506

Guldmann - Sit-On Comfort High Hygiejne



Sit-On Comfort High Hygiejne
med hygiejneåbning

Sit-On Comfort High Hygiene er et hygiejnesejl med åben bund, der kan anvendes ved løft af personer i forbindelse med hygiejne opgaver og toiletbesøg. Borgeren må ikke sidde på sejlet i kørestol pga risiko for tryk omkring den åbne bund.

Se skema vedr. sejlstørrelse

Størrelse	HMI nr. Med hygiejne åbning
Small	102562
Medium	102563
Large	102564
X-large	102565

Guldmann – Forlængerstropper

Fås i 20 og 30 cm
Leveres i sæt á 2



Se skema vedr. størrelse

Størrelse	HMI nr.
20 cm	69402
30 cm	69403

Guldmann – Bensejl



HMI nr. 42185

Bensejlet anvendes, når der er behov for at løfte tunge ben eller arme eller brug for at fastholde disse i en løftet position.

Det kan være i forbindelse med aktiviteter som sårbehandling, eller når der ydes personlig hygiejne til meget tunge personer.