


LØFT FRA GULV.


TIPS: EN PUDE UNDER HOVEDET
FØLES BEHAGELIGT!

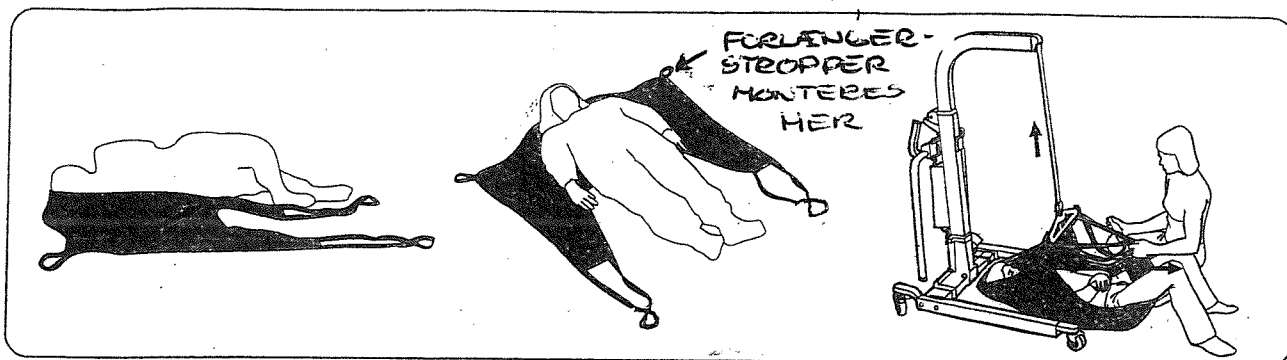

Vend brugeren forsigtigt om på siden og læg det halvt sammenrullede løftesejl under brugeren. OBS! Inderkanten ved halebenet og "midt-bag-båndet" modsvarende ryggraden.

Vend brugeren til den anden side og lirk sejlet ud. Kontroller at sejlet ligger symmetrisk under brugeren, hvis ikke – justeres placeringen. Placer benstøtterne under hvert lår.

Ret benstøtten til under brugers ben. OBS. Hold benstøtten fra skridtet for at forhindre ubehag for brugeren. **△ Mobilliften skal være låst når man løfter med brugers hoved mod liften.**

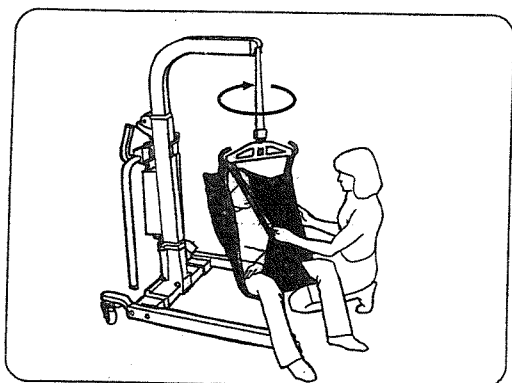

Når brugeren løftes op fra gulvet kan man dreje denne lidt for at få bedre plads til hovedet.