



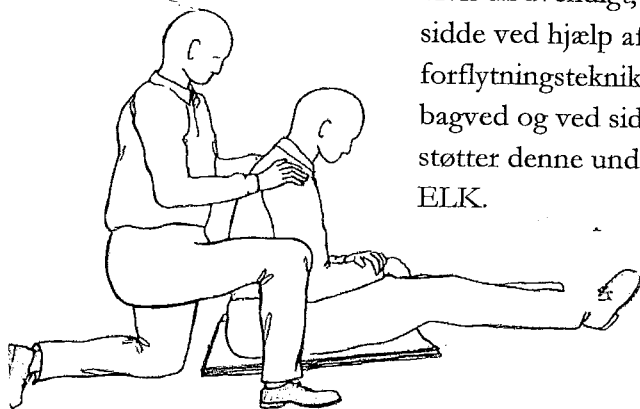

Hvis nødvendigt, hjælp brugeren op at sidde ved hjælp af korrekt forflytningsteknik. Hjælpere placerer sig bagved og ved siden af brugeren, og støtter denne under hele opfyldningen af ELK.

Forklar brugeren hvad der skal ske, så han/hun ikke forskrækkes over ELK.

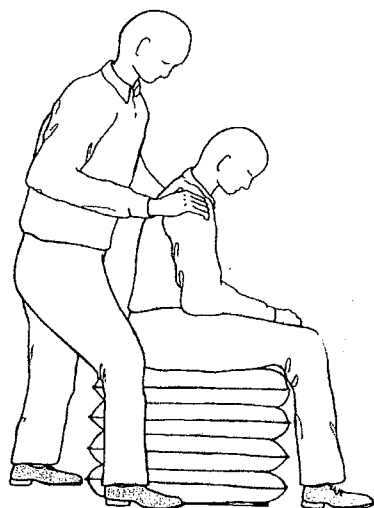

Fyld nu kammer nr. 1 ved at trykke på knap nr. 1 på håndbetjeningen (). Støt brugeren mens kamret flydes med luft. Når der er tilstrækkelige med luft i kammer nr. 1 slår Airflo automatisk fra.


Fyld kammer nr. 2, 3 og 4 på samme måde. Kamrene skal fyldes i rækkefølge – fra bund til top, og brugeren støttes under hele processen.

OBS brugeren skal kunne nå gulvet med fødderne. Efter kammer 3 er fuldt oppustet vurderes det, om det er nødvendigt at puste kammer 4 op.

For at tømme ELK frakobles de fire luftslanger fra håndbetjeningen fra dyserne. Kraverne på dyserne skubbes bagud, hvorefter slangerne kan trækkes ud.

ELK

EMERGENCY LIFTING CUSHION

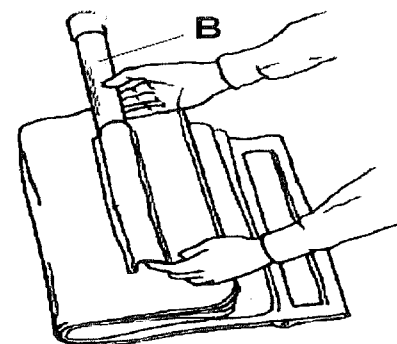

Fjern den ene endeprop på stabiliseringspinden, og træk derefter stabiliseringspinden fra dens lomme (B, figur 2) for, at kunne give brugeren en mere behagelig overflytning til ELK.


Fig 2



Fold kanten på ELK ind (figur 3). Fold ved lommen til stabiliseringspinden.


Fig 3

Fig 4

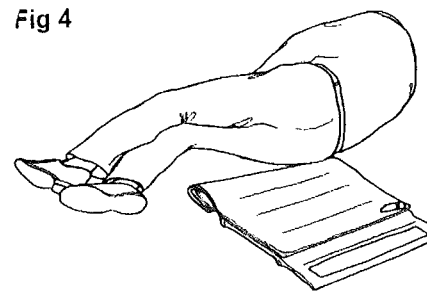


Læg ELK så tæt på brugeren som muligt, således at kanten flugter med brugerens øverste hoftekant (figur 4).

Fig 6

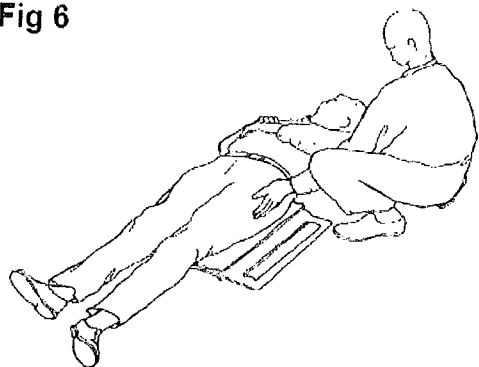

Rul brugeren over på ELK


Brugeren skal ligge på midten af ELK (figur 6). Brugeren bør ikke ligge skråt, idet dette vil skabe instabilitet, når ELK pustes op.

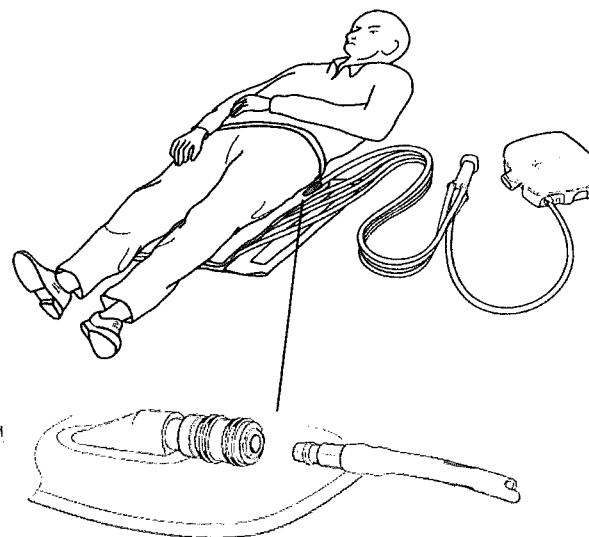

Tilslut de fire slanger) til ELK. Farver og tal på slangerne skal passe sammen med farver og tal på dyserne på ELK (bemærk at kammer 4 er det øverste kammer og IKKE det nederste).

"Auto"-kontrol-funktion skal være aktiveret for at ELK håndbetjeningen kan benyttes. Når funktionen er aktiveret, virker pumpen ved tryk på håndbetjeningens knapper.

Fig 7

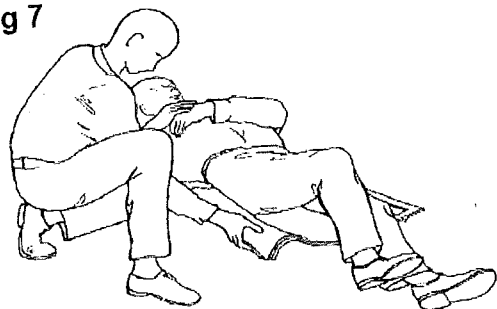

Fold kanten på ELK ud (figur 7).

Indfør stabiliseringsspinden tilbage i lommen igen og sæt endeproppen på (figur 8).

Fig 8

