

QUICKGUIDE LUNA LOFTLIFT

VIGTIGT:

Brugervejledning skal læses inden Luna tages i brug. Denne korte vejledning er et udsnit af en vejledning på 20 sider. Er du i tvivl om brugen af loftliften, skal du henvende dig til forflytningsvejlederne eller terapeuterne.

BETJENING AF LUNA LOFTLIFT

- Liften "vækkes" med enten **op** eller **ned** funktionen.
- **Reset** – Aktiverer liften efter stop eller låsefunktionen er anvendt. Reset ved at holde denne knap nede i 5 sekunder. Kan også bruges til at låse alle funktioner for at undgå utilsigtet brug – f.eks. af brugeren.
- **Nødstop** – knappen anvendes kun i nødstilfælde. Aktivering af denne knap, stopper alle funktioner omgående.
- **Nødsænk** – knappen anvendes kun i nødstilfælde – knappen anvendes såfremt der opstår en situation, hvor der er behov for at en klient skal sænkes sikkert ned ved defekt. Denne knap skal holdes inde i 5 sek.



Bajonet
monteret

OPHÆNGNING AF SEJL I LØFTEKROGE

Liften er som standart monteret med et "to punkts åg". Ergolet fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt løftesejlet ikke sættes rigtigt på plads. Det er altid hjælperen, der skal sikre, at sejlet passer til behovet og er korrekt monteret.

- 1) Sejlstroppen føres ind over krogen i den åbne position.
- 2) Stroppeerne trækkes ned således at krogen lukker.

Løftekrogens konstruktion gør at brugeren/klientens vægt automatisk vil holde krogene i lukket position.

For at frigøre sejlet efter endt løft skal stroppeerne blot trækkes opad, således at krogen åbner sig igen.



OPLADNING

Luna liften føres hen til ladestationen: Håndbetjeningen sættes i ladestationen, hvorefter opladning starter automatisk (batt. blinker).

Liften kan ikke overlades og bør derfor oplades så ofte som muligt. Sæt derfor altid håndbetjeningen i ladestationen efter brug.



VIGTIGT:

- Vær opmærksom på hvor liften/ traversen placeres under opladning af hensyn til sprinkleranlæg.
- Sørg for at holde en sikker afstand mellem brugerens hoved og loftliften, inkl. strop under løft.
- Sæt altid liften til opladning efter brug.
- Fjernbetjeningen skal altid være tilsluttet, for at liften virker.