



GULDMANN GH 2- loftlift

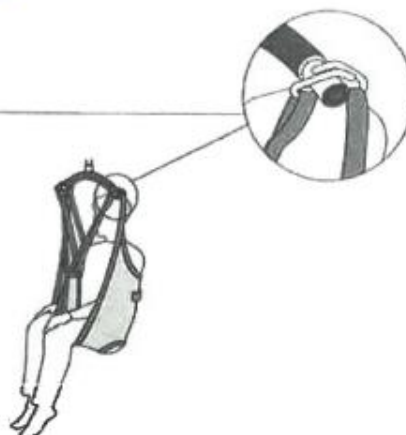

Brugervejledning GH2

- I forhold til instruktion og oplæring spørg din arbejdsmiljøkoordinator, ressourceperson i forflytninger eller din leder.
- Liften er altid til stede og klar til brug.
- Liften kan benyttes overalt indenfor skinner-systemet.
- Liften tændes ved at trykke på en af kontakt-erne på håndbetjeningen.
- Den grønne skive lyser – liften er tændt, klar til brug og alt er ok.
- Hvis den grønne skive blinker betyder det, at liften mangler strøm.
- Tjek at der ikke er slukket på kontakten, der forsyner skinner-systemet med ladestrøm. Såfremt det ikke er tilfældet skal liften fejlmeldes.
- Hvis liften ikke vil tænde kan det skyldes, at nødstopet er trukket – den røde snor (mærket med trekant symbol).
- Der skal ikke slukkes for liften – den slukker automatisk efter endt liftning (ca. 2 min efter).
- Når liften oplades lyser den gule indikator (symbol). Lampen er en indikation på, at der lades korrekt på batterierne.
- Liften lader overalt og konstant – uanset hvor den er placeret i skinner-systemet. Løftebøjlsens højde har ingen indflydelse på opladningen. Der vil altid blive ladet uanset dennes højde.
- Mærkelast er anført på liften til 200 kg. Det betyder, at liften må benyttes til en bruger, der vejer op til 200 kg. Vær dog opmærksom på, at skinner-systemet og sejlet kan have lavere mærkelast. Det er altid den laveste mærkelast, der er gældende.

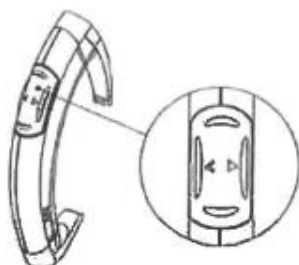

Sikkerhedsfunktioner

Nødstop

- Bruges kun i nødstilfælde, hvor der er behov for at afbryde hejset omgående.
- Når nødstoppet er aktiveret, er det udelukkende hejsets nødfir, der fungerer.
- Nødstoppet deaktiveres ved at trykke "stoppet" op i liften. Derefter trykkes der 2 gange på én af tasterne på håndbetjeningen.

Nødfir

- Bruges kun i nødstilfælde. Anvendes til at fire brugeren ned ved funktionssvigt i hejset.
- Aktiveres ved et vedvarende træk i snoren "nødfir".
- Nødfir er også placeret i den røde snor mærket med faldskærm. Nødfir bruges til at fire/sænke bruger ved driftstop under et lift. For at bruge nødfiret skal der holdes i snoren under hele nødsænkning.

Tilbehør

Løftebøjlen

Sejlstropperne placeres i krogene.

Løftesejl

- Til Guldmann løftebøjle må der anvendes løftesejl med 4-6 løftestropper som er beregnet til montering på kroge ned til Ø 8 mm.

Daglig rengøring og vedligeholdelse

- Rengøring skal foregå med en fugtig klud og almindelige rengøringsmidler. Der må ikke anvendes syre, baser eller alkohol til rengøring.

Kontakt Guldmann på:
salg tlf. 8741 3100 og
service tlf. 8741 3191
eller send en mail til
service@guldmann.com

Guldmann