


Molift Smart 150

Personløfterens komponenter:

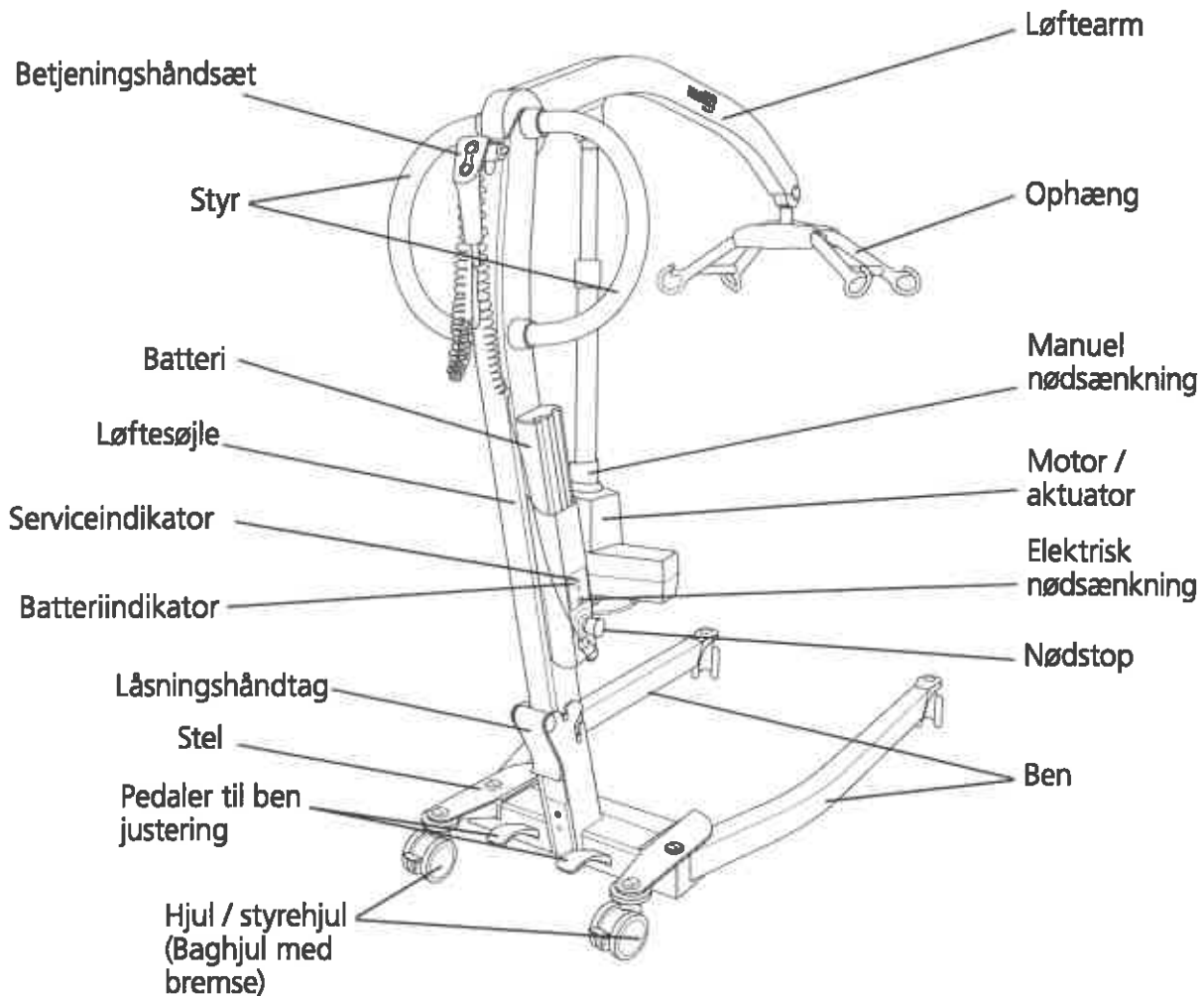

Om Molift Smart 150


Molift Smart 150 er en mobil løfteanordning, som er beregnet til at løfte og flytte en person fra/ til seng, gulv, stol, kørestol eller toilet med et sejl. Løfteanordningen er fremstillet af letvægtsmaterialer, har styrehjul og en elektrisk aktuator og er batteridrevet. Den har elektrisk indstillelige ben og en løftekapacitet på 150 kg (330 pund).

Den er ideel til hospitaler og plejehjem, men kan også bruges i private hjem. Løfteanordningen må kun benyttes til flytning over korte afstande, som for eksempel imellem en stol og en seng eller til et badeværelse/toilet, og er ikke beregnet til transport over længere afstande.


Samling

Oplad batteriet. Batteriet må ikke befinde sig i batteriholderen på løftesøjlen under opstilling eller sammenfoldning.


Assembly

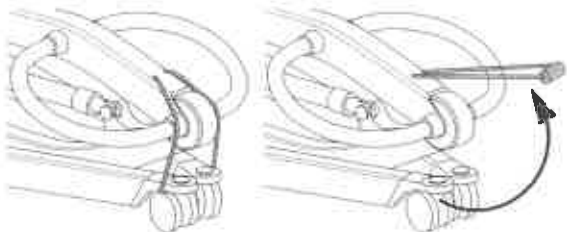


Fjern transportelastikken.

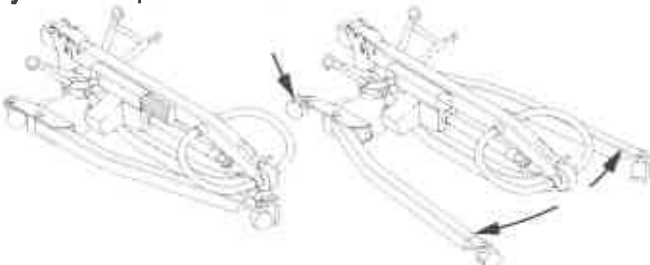

Aktivér bremsen på de bageste hjul ved at træde det venstre pedalsæt ned. Klap benene ud.

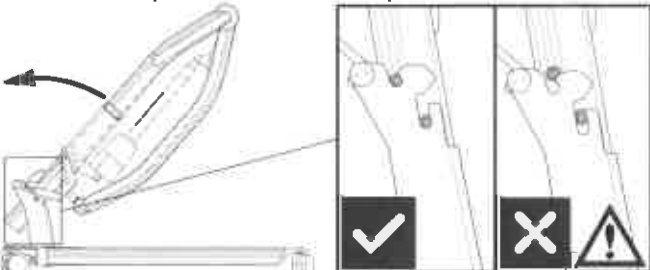

Løft løftesøjlen op, og skyd den ned i beslaget på chassiset. Sørg for, at den kommer til at sidde helt nede i bunden af chassiset.

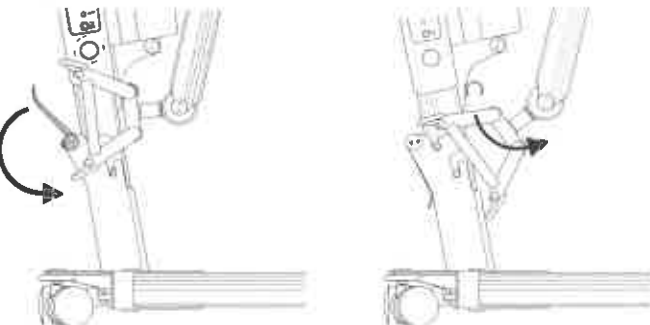


Løftesøjlen skal fastgøres med låsehåndtaget på bagsiden af chassiset. Træk ophænget ud af transportkrogen



Pas på ikke at få ben/arme/hænder i klemme imellem delene under opstilling/sammenfoldning af løftesøjlen.

Batteri og betjeningshåndsat

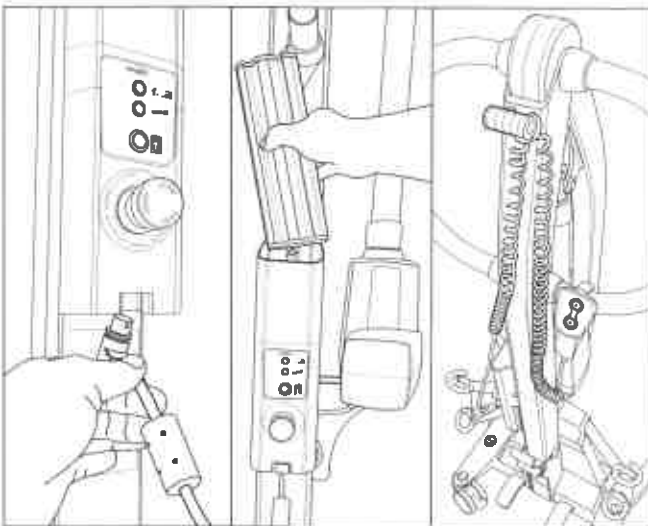

1. Tilslut betjeningshåndsettet til bunden af batteriholderen.
2. Indsæt batteriet med terminalerne nedad.
3. Træk elastikken ud, og før betjeningshåndsettet igennem. Træk et stykke af kablet igennem, så betjeningshåndsettet ikke falder på gulvet, hvis det tabes.

Foldning (transporttilstand)

Kør løftearmen hele vejen ned, og fjern batteriet. Fold personløfteren sammen i den modsatte rækkefølge i forhold til opstillingen. Fastgør ophænget i krogen igen.

Det er muligt at dele løfteren i to separate dele ved at løfte søjlen helt ud af chassiset.

Tjekliste efter samling



Brug ikke produktet, før du har kontrolleret alle punkterne på nedenstående tjekliste.

Brug denne tjekliste til at bekræfte, at personløfteren er korrekt installeret og kan betjenes korrekt og sikkert, før den tages i brug.

- ☐ Kontrollér, at løftearmen, løftesøjlen og ophænget er korrekt fastgjort, og at der ikke er nogen løse dele på personløfteren.
- ☐ Kontrollér, at batteriet er ladet op (ingen lysende lamper i batteriindikatoren).
- ☐ Kontrollér, at personløfteren ikke har synlige skader eller andre fejl.
- ☐ Udfør en løftning med belastning (ca. 50 kg)