

Vejledning brug af Return




Bundpladen og føddernes placering



Fødderne placeres på hver side af bundpladen, se fodaftryk på bundpladen.

Brugerens tyngde skal havne inden for produktets understøttelsesflade (hele vægten inden for hjulene), dvs. brugeren skal være i stående position. Brugeren må ikke have kroppens tyngde uden for understøttelsesfladen.


Underbensstøtte

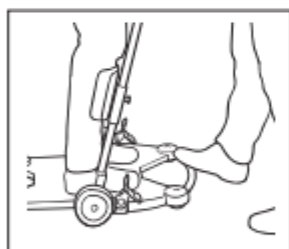

Underbensstøtten justeres ind, så pladens øverste kant ligger ca. 3 cm/to fingre under knæskallens nedre kant. Træk i de to bolte for at løsne, justér til en passende højde.

Sørg for, at boltene igen låses. Underbensstøtten kan også justeres sidelæns.

Bremse

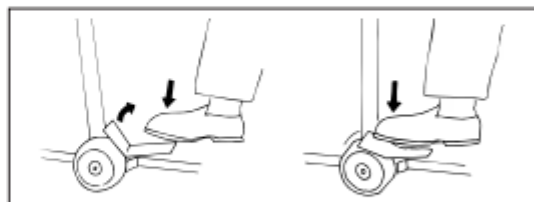

Der er en bremse på hvert hjul. Træd på bremsepladens røde markering; sørg for, at du træder dem ned i bunden.

For at låse bremsen op, træder du på bremsepladen, så den går tilbage til sit oprindelige leje, grøn markering. Sørg for, at hjulet ruller frit.

Forflytning




Seng til kørestol:

Placer kørestolen en lidt ud fra sengen for at få tilstrækkelig plads til at arbejde på. Lås kørestolens hjul. Placer brugerens fødder på bundpladen. Brugeren griber fat, læner sig frem og rejser sig op. Træk ReTurn en smule bagud for derefter at styre ind mod kørestolen.

Styr tilstrækkelig langt ind for at opnå en god placering i kørestolen. Inden brugeren sætter sig ned, skal hjælperen skabe modvægt.

Ved behov for at fastgøre ReTurnBelt til ReTurn7500

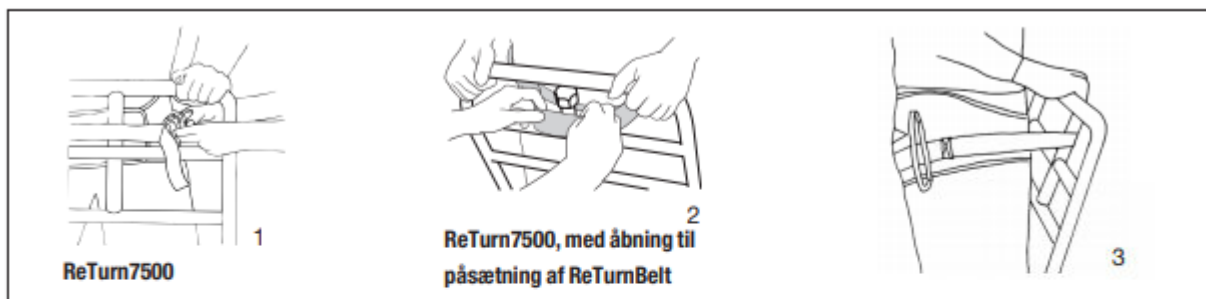

ReTurn7500:

Fastgør ikke låsespændet på ReTurnBelt, inden brugeren rejses op. Når brugeren er i stående position mod ReTurn, kan låsebåndet placeres omkring et af de vertikale håndtag på stigen.

Fastgør låsespændet på ReTurnBelt. Der høres en kliklyd, når spændet går i låst position. (billede 1).


ReTurn7500, med åbning til ReTurnBelt:

Fastgør låsespændet på ReTurnBelt uden at spænde båndet. Der høres en kliklyd, når spændet er i låst position.

Når brugeren er i stående position mod ReTurn, trækkes låsebåndet gennem åbningen på det øverste lodrette håndtag og lægges ned mod mellemstangen (billede 2).

Brugeren kan nu forflyttes med ReTurn. Planlæg forflytningen, så den bliver så kort som muligt (billede 3).

At sætte brugeren ned

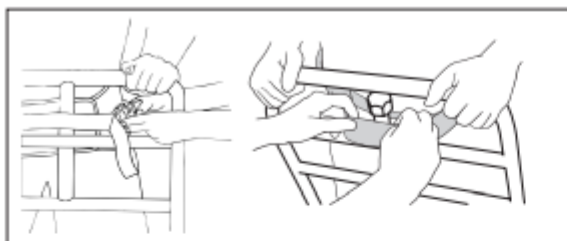

Brems hjulene på ReTurn. Sørg for, at brugeren er i stående position mod ReTurn, så låsebåndet bliver slapt. Lås spændet op og/eller træk båndet væk fra ReTurn; fold det gerne ind under kanten på bæltet, så det ikke kan hænge fast. Hjælp brugeren med at komme ned i siddende stilling ved at assistere med ReTurnBelt.



Til toiletstol/badeskammel

Ved forflytning til toiletstol skal der laves plads til, at hjælperen kan assistere brugeren med bukserne. Udtaget i bundpladens bagkant gør, at brugeren kommer tilstrækkeligt tæt på toiletstolen og opnår en god siddestilling.

Rengøringsvejledning

Produkternes overflade kan rengøres med varmt vand eller sæbeopløsning. Ved behov for desinficering kan anvendes 70 % ethanol, 45 % isopropanol eller lignende.



Medicinsk udstyr klasse I produkt

Produktet opfylder kravene i direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EØF.

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.handicare.com for en komplet forhandlerliste.

Forventet levetid

Op til 10 år ved normal brug.