

Roto-care seng

Borger ud af seng

Aktiver ben del, til denne er i maks.

Spilerdug placeres



Aktiver ryg del, til denne er i ca. 45 gr.

Spilerdug fjernes



Træk/skub den sorte knop mod gavlen.

(se billede, for enden af pilen)



Sengen drejes, til den låser.

(nemtest ved at trække i sengehesten
nærmest fødderne)



Bendel køres ned, samtidig med at rygdel
køres op.

(vigtigt at bendel køres til den stopper)

Har borgeren svært ved at rejse sig, kan
sengen hæves.



Roto-care seng

Borger i seng

Borger sætter sig i midten af sengestolen, så langt tilbage som muligt.



Ben del køres op, til fødderne er ca. 10 cm over gulvet.




Når fødderne er 10 cm over gulv, kører ryg del ned samtidig med ben del køres op. Stopper med ryg del i ca. 45 gr. der fortsættes med ben del, til den stopper automatisk.



Træk/skub den sorte knop mod gavlen.

(se billede, for enden af pilen)

Sengen drejes ind til den låser

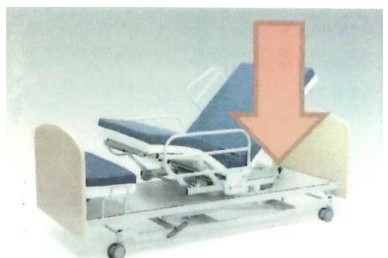

Ryg del køres ned først, derefter ben del.

