

Vejledning i brug af silkelagner


WendyLett fra Handicare

Madras cover gør at borgeren lettere selvstændigt eller med guidning kan vende sig fra side til side.




Dette findes i 2 længder:

Til borgere som f.eks. kan skubbe fra med fødderne i madrassen, vælges den korte udgave.

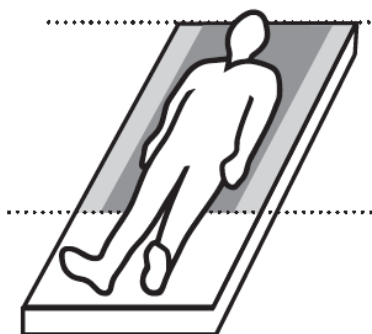

Glidezone hoved-hofte: Til mindre aktive/tungere brugere der har behov for glidefunktionen fra hofterne og opæfter.

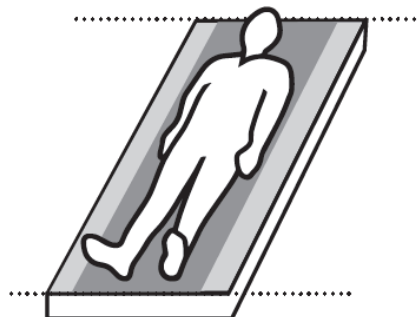


Glidezone hoved-fødder: Til brugere der er passive/har behov for mere intensiv pleje hvor der kræves glidefunktionalitet under hele kroppen.

Når medarbejderen skal hjælpe borgeren med at forflytte sig i sengen, anvendes et trykstykke oven på madrascover.

Dette gør at der kan flyttes i alle 4 retninger.

Sikkelagner kan anvendes af én medarbejder. Ved konkret vurdering kan der være 2 medarbejdere om forflytningen.

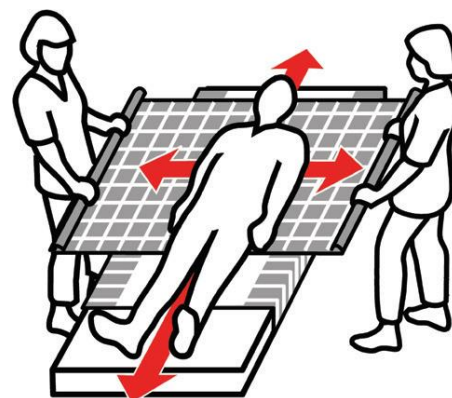

På nogle systemer er der stropper, således af liftten kan anvendes til at vende borgeren.

Herved mindskes belastningen for medarbejderne.

