

Forflytning med Spiler+ Long



Spiler+ er forflytningslagnet som du anvender når det er hensigtsmæssigt at lade loftliften lave arbejdet.

Herved kan du fortsætte med at bruge spilerdug og have glid i alle retninger, også når forflytningerne bliver for tunge.

Brehms Spilerdug ApS

+45 57648351 – info@spilerdug.dk – www.spilerdug.dk

Vending i seng Spiler+ Long, passiv person



Forbered forflytningen.

Placer puden så personen også har hovedstøtte efter vending.



Fæst Spiler+ på liftens løfteåg.



Fold spilerdugen i fede folder.

Yderligere information om at placere spilerdug, se At Placere spilerdug (vejledning eller videoer) på www.spilerdug.dk.



Kør liften lidt op så du skaber plads.
Personen skal blot vippes lidt.

Placer spilerdug halvt ind under
kroppen, som du plejer.

Her er anvendt et foldet stykke un-
der kroppen og et under lægge/
fødder.



Hold eventuelt igen på Spiler+ når du
placerer spilerdug ved fødderne.



Sænk løfteåget og afmonter Spiler+.



Fæst Spiler+ på liftens løfteåg på modsatte side og kør liften lidt op så personen vippes.



Fold spilerdugen ud.

Nu kan du anvende liften til at trække personen til siden, vendinger eller højere op i seng.



Glid personen til modsatte side inden vending.



Kør liften op så personen bliver vendt om på siden, stabiliser evt. ved hoften.



Udfør nu plejeopgaver og forflytninger. Anvend loftliften ved behov.

Når plejeopgaverne er udført, kan spilerdugen fjernes.



Fæst Spiler+ på liftens løfteåg og kør liften lidt op så personen vip-
pes.

Glid spilerdugen tilbage, halvt ind under kroppen.



Sænk løfteåget og afmonter Spiler+.



Fjern spilerdugen.

Yderligere information om at fjerne spilerdug, se
At fjerne spilerdug (vejledning eller videoer) på
www.spilerdug.dk.



Højere op i seng



Sæt stropperne på løfteåget ud for skuldrene og hele vejen op i begge sider



Kør liften op så hoved og skuldre er frie af underlaget.



Glid personen roligt op ved f.eks. at trække i stropperne når du står for enden af sengen eller når du står på siden (husk at træk mod dit eget bækken).

Glid personen til midten af sengen hvis du har stået på siden af sengen når du forflytter personen højere op i seng.



Information og vejledende anbefalinger



Spiler+ Long

Varenummer/HMI: 101927

145 cm. bred X 240 cm lang.

- kan eventuelt erstatte lagnet -

Vejledende størrelse på spilerdug:

175-200 cm bred x 100 cm lang foldet *eller* 2 stykker 100 cm bred x 130 cm lang under kroppen *og eventuelt*

100 cm x 100 cm foldet *eller* 2 stykker 65-100 cm x 100 cm under lægge og hæle.

Fakta

Kan vaskes på 80 grader og tørre tumbles ved lav temperatur.

Maxbelastning 200 kg.

80 % polyester og 20 % bomuld (lagen), 100% polyester (greb)

Anvendes med spilerdug under.



Spiler+ forflytningslagen findes også i en kort model 145 cm bred og 140 cm. lang.

Anvendes som Spiler+ Long.



Spiler+ er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

