



Håndtesten:

Udføres dagligt for at sikre at madrassen/luftpuden holder det korrekte tryk.

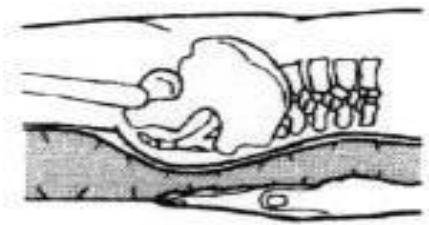

Der skal være 1½- 2cm aflastende materiale under de dybest stikkende skeletdele.

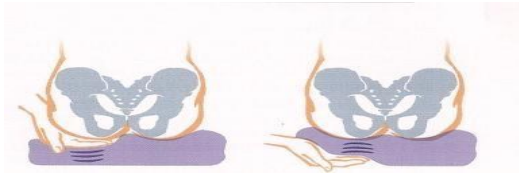

Er der for lidt luft i **puden** fyldes der mere i af ergoterapeut.

Vekseltryksmadrasser, tjek lameller, vægtindstilling og slanger.

Hvis madrassen/puden **ikke** har korrekt luftmængde, må den ikke anvendes og skal fejlmeldes.

Tjek siddestilling:



Borger skal sidde helt tilbage i sædet på kørestolen, og puden skal ligge korrekt i stolesædet.

Obs på om puden også ligger korrekt inde i betrækket.

Fodstøtter indstillet i rigtig højde:

Der skal være kontakt mellem lår og pude.


Armlæn:

Skulder skal være i neutral stilling, når arme hviler på armlæn.

Hvis du oplever at kørestolen ikke er korrekt indstillet, skal der rettes henvendelse til teamets ergoterapeut.

Aflastning af hæle:

- Placerer en lille pude under knæ og læggen.
- Brug sengens knæ-knæk, sænk fodenden lidt.

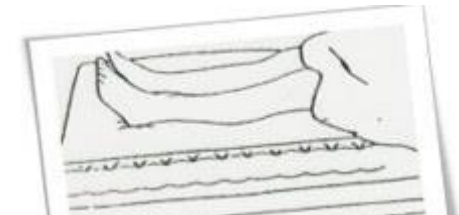

Kontrol:

- Placer et papir under hælene.
- Krøller papiret ikke, er hæle godt aflastede.

Hyppige fejl ved brug af aflastende puder til stol/kørestol:

Roho-pude ("flødebollepude"):

Indstilling og tilføjelse af luft foretages af ergoterapeut.

Kontroller pude via håndtest, og kontakt ergoterapeut, hvis ikke puden har korrekt luftniveau.

Rød/grøn ventil skal placeres fortil.

Jay-pude (pude med gele-del):

Husk at gele-delen skal placeres under bagdelen.

Viskoelastisk skum-pude med forhøjning:

Forhøjning skal forhindre fremad-skridning, og placeres fortil mellem lårene.

HUSK:

Puderne skal placeres korrekt i forhold til deres opbygning, dvs. sådan at markering på betræk; for- bag-, op- og ned- er placeret korrekt i kørestol/stol.

OBS at puden vender rigtigt inde i betrækket.

Hyppige fejl ved vekseltrykmadrasser:

Bipper og lamper blinker:

Fejl:

CPR ventil sidder ikke ordentligt i.

Handling: Luk CPR ventil

Fejl:

Der har været slukket på stikkontakten/stikket har været taget ud, mens pumpen har været tændt.

Handling: Sluk på selve pumpen. Vent ca. 5 sek. Og tænd igen.

Der er ingen/kun lidt luft i madrassen:

Fejl:

En af luftslangerne er ikke ordentlig på/CPR-ventil er ikke i/slangerne er i klemme i sengehesten.

Handling: Tjek slangerne og sæt dem på igen.

Betjeningsvejledning for den enkelte madras, angiver årsager til alarm og handlemuligheder.

Denne er vedhæftet pumpedel eller kan findes i Den Elektroniske Håndbog.

Madrassen skal lægges direkte på sengebunden.
Fastgøres med tilhørende stropper.

Håndtering af tryksårforebyggende hjælpemidler.



Udarbejdet af sårkonsulenterne i samarbejde med
forflytningskoordinator og hj.midl. ergoterapeut
Næstved Kommune dec. 2011.
Revideret februar 2021