


Nimbus 3

Helmadras

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP

Installationsvejledning

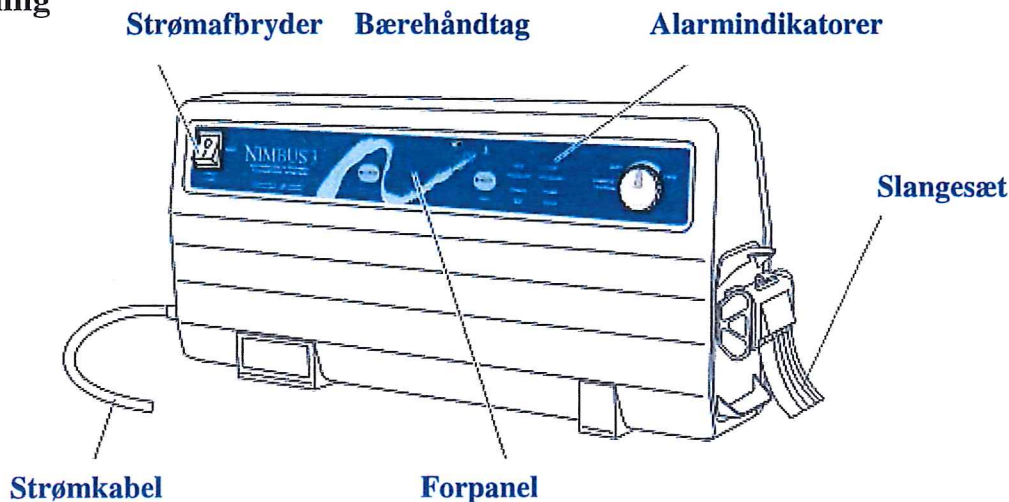

Læg Nimbus 3 direkte på sengebunden, så betrækket vender opad og symbolet med fødderne nede mod benenden og fastgør den v.h.j.a. gjordene.

Lynlåsen på madrassens side åbnes og det kontrolleres, om sensormåtten, der er placeret mellem de to skumlag, er plan og uden folder samt at luftslangen ikke er afklemmt. Luk lynlåsen igen.

CPR-håndtaget skal være lukket og låst. (Hvis ikke: Skub plastlåget ind og drej det røde håndgreb mod højre. Læg håndgrebet ned mod plastlåget). Sørg for, at pilen på transportindikatoren peger på "Normal".

Tilslut luftslangen på madrassen: Tag fat om luftslangen, lige under udgangsbeslaget. Vip slangen ind mod madrastilslutningen nedefra og opefter. Når der høres et "klik" er slangen rigtig monteret.


Pumpen hænges på sengegavl i sengens fodende.

Tilslut luftslangen til pumpen på samme måde som til madrassen.

Kontroller at tilslutningerne til madras og pumpe er ordentligt fastgjorte.

Tilslut pumpens netledning til stikkontakten (230V).
Tænd for stikkontakt og derefter pumpe.

Evt. lagen lægges løst hen over Nimbus 3 og fastgøres med clipsene på gjord-båndene.

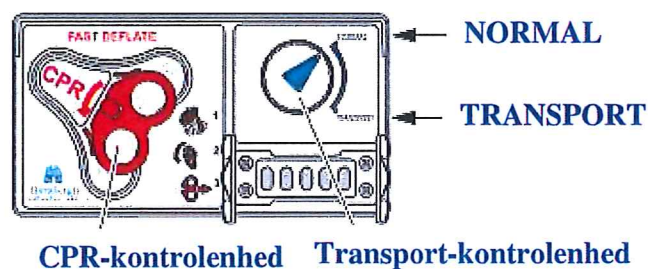

Træk i det røde CPR greb drej det mod venstre. CPR er placeret i madrassens fodende

OBS! Dette er kun en lynvejledning og kan ikke erstatte brugervejledningen. For yderligere information henvises til brugervejledningen eller kontakt ArjoHuntleigh

Fejlfinding

Indikator med lys	Mulig årsag	Afhjælpning
LOW PRESSURE WAIT	Ingen fejl Pumpen luftfylder madrassen. Indikatorerne slukkes, når korrekt driftstryk er nået.	
LOW PRESSURE	Luftslangen er ikke tilsluttet korrekt. Madrassen er sat på TRANSPORT . Der er en læk i systemet	Kontroller slangefor-bindingerne og sørg for, at de er ordentligt fastgjort til pumpen og madrassen. Drej betjeningsgrebet på madrassens kontrolboks til NORMAL . Tilkald servicetekniker
HIGH PRESSURE	Der er en blokering i, eller af, luftslangen.	Undersøg, at luftslangen ikke er foldet eller snoet, men glat. Kontroller, at Auto-Matt -måtten er flad og ikke foldet.
POWER – blinker med trekant	Strømmen til enheden er blevet afbrudt.	Tilslut strømmen igen, eller sluk for enheden. Hvis strømafbrydelsen varer ved, skift til TRANSPORT - funktion og frakobl slangerne. Madrassen holdes oppustet i mindst 12 timer.
POWER – Vedvarende lys	Et midlertidigt strømsvigt er opstået i pumpen.	Undersøg, at pumpen stadig er sat til den ønskede driftsfunktion (statisk eller dynamisk). POWER - indikatoren kan annulleres ved at slukke for enheden og tænde den igen.
PUMP (pumpefejl)	Intern funktionsfejl i pumpen, f.eks. ventilfejl.	Kontakt ArjoHuntleigh