

Problemløsning i forbindelse med SoftAIR madrassystemerne

Den røde lampe lyser, og der udsendes en akustisk alarm for at angive, at kontrolenheden eller madrastrykket er fejlbehæftet. LED-lampen forbliver tændt, indtil det korrekte tryk er genoprettet. Den akustiske alarm kan slås på lydløs ved tryk på Alarm Mute-knappen. Systemet har forskellige alarmsignaler, der angives ved fem forskellige trykindstillingstændingssekvenser. Signalerne og det tilhørende trykindstillingslampedisplay vises nedenfor.

Alarm/Fejl	Årsag	Løsning
 + akustisk alarm	Opstartsfejl	1. Nulstil alarmeren - sluk for strømmen, og tryk på knappen "Alarm Mute". 2. Kontrollér, at håndgrebet er intakt ved at sikre, at alle fire forseglinger sidder korrekt fast på kontrolenheden og luftslangerne. Kontrollér, at genoplivningstrækstrimmelen og forseglingerne sidder godt fast. 3. Kontrollér alle luftslanger langs indersiden af madrassen - alle skal sidde godt fast. Kontrollér, at alle luftceller sidder godt fast på forbindelseslufttrøret. 4. Kontrollér alle celler, rør og slanger for luftlækage. 5. Tænd for strømmen.
 + akustisk alarm	Tryk for lavt	1. Nulstil alarmeren - sluk for strømmen, og tryk på knappen "Alarm Mute". 2. Kontrollér, at håndgrebet er intakt ved at sikre, at alle fire forseglinger sidder korrekt fast på kontrolenheden og luftslangerne. Kontrollér, at genoplivningstrækstrimmelen og forseglingerne sidder godt fast. 3. Kontrollér alle luftslanger langs indersiden af madrassen - alle skal sidde godt fast. Kontrollér, at alle luftceller sidder godt fast på forbindelseslufttrøret. 4. Kontrollér alle celler, rør og slanger for luftlækage. 5. Kontrollér, at luftfilterpladen sidder godt fast, og at luftfilteret er rent. 6. Tænd for strømmen.
 + akustisk alarm	Tryk for højt	1. Nulstil alarmeren - sluk for strømmen, og tryk på knappen "Alarm Mute". 2. Frakobl luftslangerne for at reducere trykket - sæt dem på igen, når trykket er faldet. 3. Kontrollér, om luftslangerne snor sig mellem madrassen og kontrolenheden. 4. Tænd for strømmen.
 + akustisk alarm	Vekselsmodus-fejl (Ingen vekslen)	1. Nulstil alarmeren - sluk for strømmen, og tryk på knappen "Alarm Mute". 2. Frakobl luftslangerne for at reducere trykket - sæt dem på igen, når trykket er faldet.
 + akustisk alarm	AC-Strømsvigt	1. Tryk på knappen "Alarm Mute" for at slå lyden fra den akustiske alarm fra. 2. Kontrollér, at ledningen sidder ind i stikkontakten og kontrolenheden, og kontrollér, at der er tændt for strømforsyningen. 3. Kontrollér kontrolenhedens sikring (1 AMP) - sikringen kan løses ved at presse en skruetrækker ind og dreje den.


Yderligere information om problemløsning og betjening af SoftAIR madrasserne, se venligst brugermanualen. Brugermanual samt øvrig dokumentation kan frit downloades på Invacares hjemmeside www.invacare.dk

SoftAIR®

Quick betjeningsvejledning for SoftAIR Super og SoftAIR Excellence



Yes, you can.®

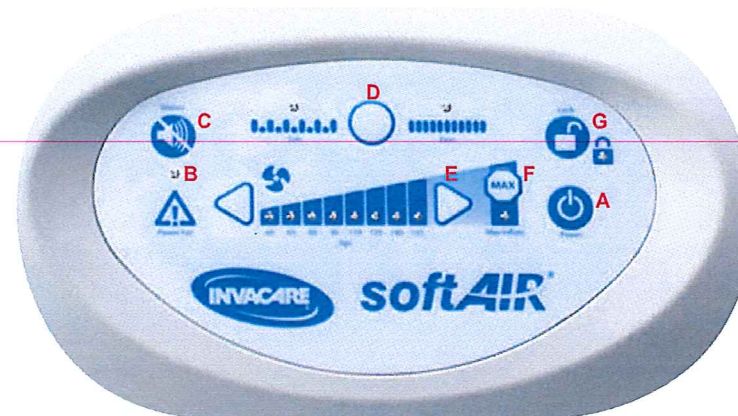

A Tænd-knap

Tænder og slukker for systemet

B Alarmlampe

Denne røde lampe lyser, og der udsendes en akustisk alarm for at advare om, at kontrolenheden eller madrastrykket er fejlbehæftet.

Alarmeren har fem forskellige signaler til angivelse af årsagen til fejlen.

Den akustiske alarm lyder, når strømmen slås fra - tryk på Alarm Mute for at slå lyden fra.

C Knappen "Alarm Mute"

Slår den akustiske alarm til/fra. Den akustiske alarm genoptages efter 20 minutter, såfremt fejlen ikke er blevet rettet.

D Komfortindstillingsvælger

Tryk her for at vælge enten vekslende tryk (cellerne skiftevis oppustes og tømmes for luft) eller statisk indstilling (alle celler er fuldt oppustede uden dynamisk vekslen).

E Tryk-pileknapper

Tryk på pilene for at hæve eller sænke komfort indstillingen. Der findes otte trykindstillinger fra blød til hård.

De grønne lamper lyser for at angive,

hvilken af de otte indstillinger der er valgt.

F Max. hårdhed-knap

Tryk her for at starte hurtig oppustning til maksimal trykindstilling (60 mmHg). Efter 30 minutter vender systemet automatisk tilbage til den foregående indstilling af patientsikkerhedshensyn.

G Lås/Lås op-knap for kontrolenheden

Holdes inde i mindst to sekunder for at låse kontrolenhedsindstillingerne - der høres et bip, og den gule lampe lyser for at angive, at systemet er låst. I låst tilstand kan man kun betjene knapperne til Alarm Mute og Lås/Lås op. Hold knappen inde i mindst to sekunder for at låse enheden op (der høres et bip, og den gulelampe slukkes).

OBS! Kontrolenheden låses automatisk op i tilfælde af strømsvigt



- Dette udstyr må ikke anvendes ved tilstedeværelse af brandbare bedøvelsesmidler.

- Minimér antallet af ting imellem systemets overflade og patienten, og læg lagner løst på (fæstet i hjørnerne), så de ikke påvirker vekselcellernes bevægelse.