


Kort brugervejledning til Mobiwatch

Anvendes sammen med retningslinje: Brugervejledning til Mobiwatch

Anvendes

Til følgende resistente mikroorganismer og smitsomme sygdomme: **CPO, ESBL, VRE og Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile.**

Rummene skal være rengjort før anvendelse af Mobiwatch

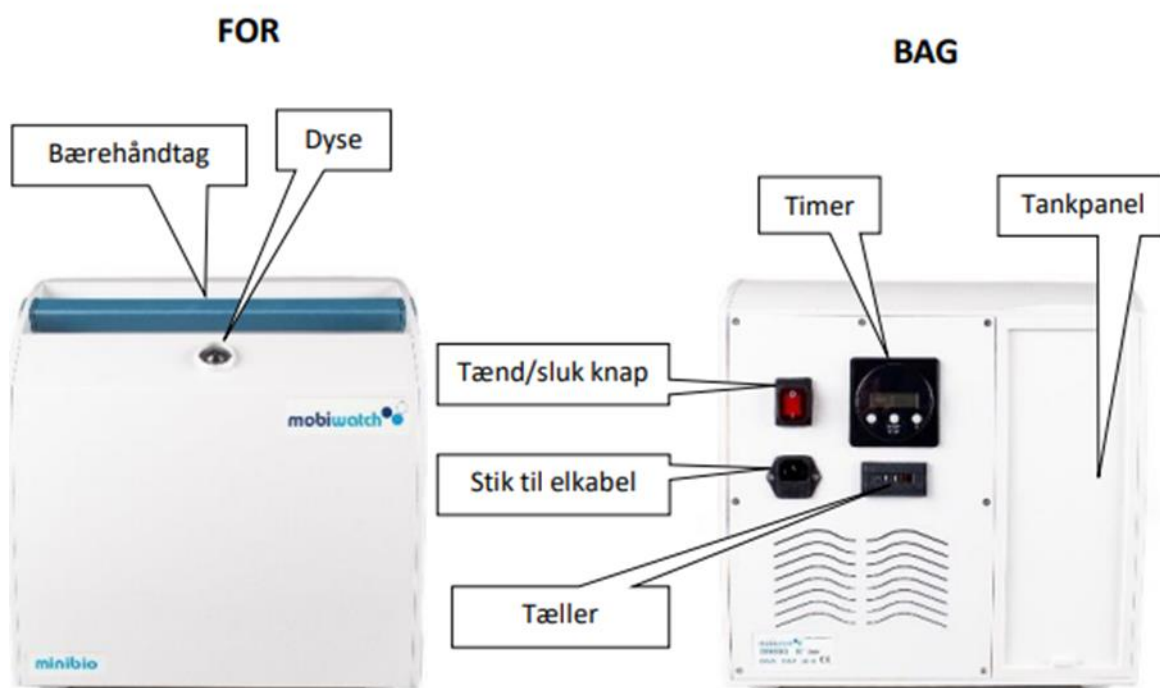

Før desinfektion

Bolig rengøres før desinfektion med Mobiwatch

Der benyttes følgende værnemidler ved rengøring og tømning af bolig: langærmet overtrækskittel, handsker, mundbind og visir/brille

- Boligen tømmes for al borgers inventar
- Gardiner nedtages ved synlig forurening og vaskes ved 60 grader
- Rullegardin/persienner rengøres og rulle 1/3 ned/ud
- Boligen og blivende inventar rengøres med almindeligt rengøringsmiddel
- Køleskabet er afrimet, tomt og står åbent (hvis i drift holdes det lukket)
- Evt. skrald fjernes
- Madras lægges op på den ene sengegavl
- Hynder på andre stole rejses ligeledes op
- Evt. sengebord bækkenstol, gangstativ, og øvrigt inventar uden stof, kan forblive på stuen
- Låger og skuffer åbnes
- Dør mellem bolig og toilet åbnes (så forstøvningen kan komme ud på toilettet)
- Ventilation tildækkes, med plastik og malertap eller evt. med kasse og stang

- Udluftslemme på døre og vinduer lukkes
- Evt. brandalarm tildækkes (sprinkleranlæg er varmefølsomme og påvirkes ikke) med plastik og malertape eller evt. med kasse og stang


Opstilling og igangsættelse

Der må ikke opholde sig mennesker eller dyr i lokalet under behandling

Følg tjekliste til dokumentation ved opstilling og start (Tjekliste)

Opstilling

- Det sikres at der i maskinen er tilstrækkelig væske til at udføre desinfektionen
- Hvis ikke påfyldes væske (se Brugervejledning til Mobivatch, afsnit nr.10, eller sidst i dette dokument)
- Temperatur på lokalet, maskinen og desinfektionsvæsken skal være ca. den samme
- Maskinen med den rette mængde desinfektionsvæske påfyldt, placeres på gulvet i hjørnet af den længste diagonal, så der blæses væk fra vinduer (se evt. Brugervejledning til Mobivatch, bilag 1, eller tegning af stuerne) således at der er 1,5-2 m frit område foran dysen
- Tilslut strøm
- Maskinen er nu klart til at tænde

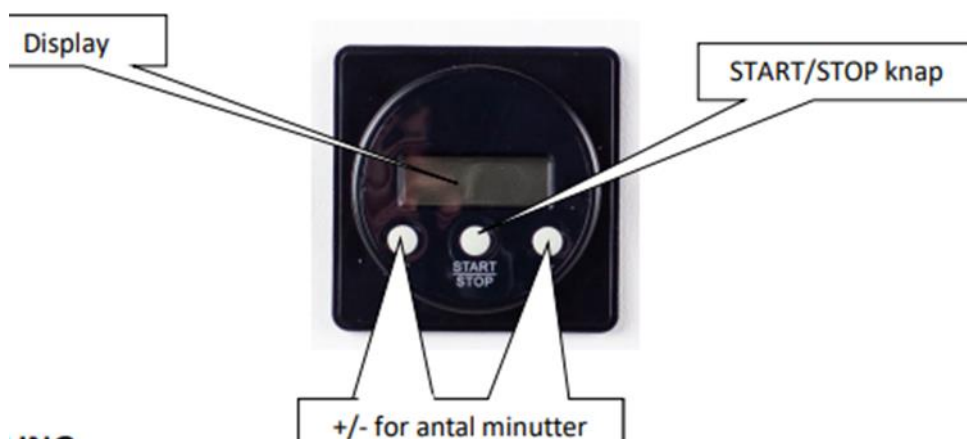

Igangsætning

- Tænd for maskinen (kontakten lyser op)
- Sæt timeren til den beregnede tid (antal minutter ses i displayet)
- Når den ønskede tid ses i displayet, tryk på START knappen i midten
- Ved tryk på start lyder der et lille klik og kolon (:) i displayet blinker
- Der går nu 1 min inden maskinen starter
- Det tjekkes at maskinen begynder at danne tåge inden man går ud
- Døren til rummet lukkes, vigtigt at sprækker under og langs døren tapes til, husk evt. nøglehul og brevsprække, brug bred malertape. Sæt evt. også malertape over dørhåndtag så det indikerer at man ikke skal gå ind
- Print advarselsskilt ud og sæt det på døren, noter hvornår lokalet er klar til brug igen
- Når maskinen er i brug, luger der svagt af eddike
- Når behandling af rummet er færdig, vil der lyde en række bip fra maskinen
- Maskinen slukker af sig selv
- **Efter lokalets behandlingstid + 4 timer er desinfektionen af rummet færdig**
- Fjer skilt og malertape



- Fjern tape fra vinduer, brandalarmer, udsug m.m.
- Maskinen fjernes fra lokalet, skal ikke rengøres eller desinficere efter brug
- Køres retur til opbevaringssted

Afbrydelse af desinfektion

Hvis der er brug for at afbryde desinfektionen inden den er gået i gang, gøres følgende:

- Tryk én gang på START/STOP knappen
- Maskinen stopper
- Gen start af maskinen
- Tryk igen én gang på START/STOP knappen

Behandlingen vil fortsætte fra hvor den blev stoppet og den oprindelige programtid fuldføres.

Påfyldning af væske

Ved håndtering og påfyldning af Mobivatch S PP-opløsning anvendes altid:

- latex handsker
- plastforklæde
- visir/ briller

Arbejdsgang:

- Lugen åbnes
- Træk forsigtigt i toppen af tanken og sæt den fast i åbningen med en vinkel på 30-45 grader
- Skru låget af
- Undgå at trække unødigt i rørene
- Ven dunken så der hældes sidelæns ned i tanken (der kommer luft i dunken, undgår derved at væsken skvulper over)
- Brug evt. en tragt når der hældes fra dunk til tank
- Væsken S Formulering kan opbevares i op til 3 måneder i tanken
- Væsken må **aldrig** hældes tilbage i original beholder

