

Mix-Ad Set Tips & Tricks



Tip: Dråbekammer skal fyldes til niveaumarkering, inden resten af sættet fyldes, og efter at skyllevæsken er sprøjtet i infusionsbeholderen.

Hvis luer-sprøjten ikke kan sidde fast på den nålefri membran. Luer-sprøjte skal monteres på den nålefri membran (SWAN) ved at trykke den helt ind i SWAN og derefter rotere ¼ omgang.



Hvis infusionen ikke løber. Afklem patientnært infusions-slange roligt sammen. Herefter slippes infusionsslangen hurtig.


Hvis den opløste medicin ikke kan løbe tilbage til infusionsposen.

Hvis rød cap (filter) bliver vådt, vil opløst antibiotika ikke løbe retur til infusionsbeholderen. "Pust" da med en Luer-sprøjte ind på filteret, så det "tørre". Det kan i nogle tilfælde hjælpe. **OBS rød cap kan være lukket.**

Hvis det er svært at få opløst Pip/Tazo, og det klæber sig fast til hætteglasset.


Ved håndtering af Pip Tazo - Piperacillin/Tazobactam. Bank det tørre pulver, så det løsner sig, inden glasset sættes på. Roter herefter hætteglasset når NaCl løber ned, så pulveret samler sig i bunden af hætteglasset. (Gør glassets inderside våd) Når glasset er ½ fyldt, luk da for rød cap og slide clamp, ryst og opløs pulver.

Tip: Rulleklemme og god ergonomi:
Parkeringsplads til slange

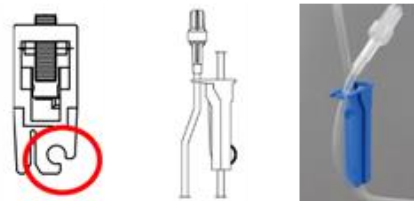

Klem slangen mellem tommel- og pegefinger og skub slangen ind i p-plads af rulleklemmen

Stop af væskestrøm/pause funktion

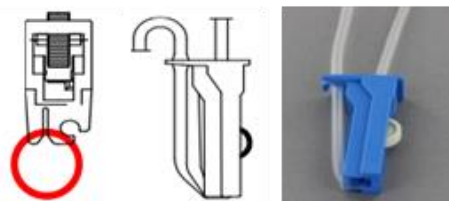

Klem slangen under rulleklemmen, mellem tommel- og pegefinger. Før slange op til revne i toppen af rulleklemmen



Hvis væsken ikke løber af sig selv, slå da på toppen af semi rigid infusionsbeholder. Tryk ikke på beholderen. Udnyt gravitation. Se billede.



Kontakt
CODAN DEHA ApS
Lykebakvej 22
DK-4600 Køge
Telefon +45 49 12 11 80
codan@codandeha.dk

CODAN DEHA ApS Produktspecialist:
Region Hovedstaden +45 29 33 12 79
Region Sjælland +45 20 27 49 32
Region Syddanmark +45 23 26 57 02
Region Midtjylland +45 20 32 65 42
Region Nordjylland +45 20 32 65 42



QR kode til Mix-Ad video