


Grundet restordre på Easypump anvendes Baxter-pumpe

Vigtige opmærksomhedspunkter ved fyldning og anvendelse!!!!

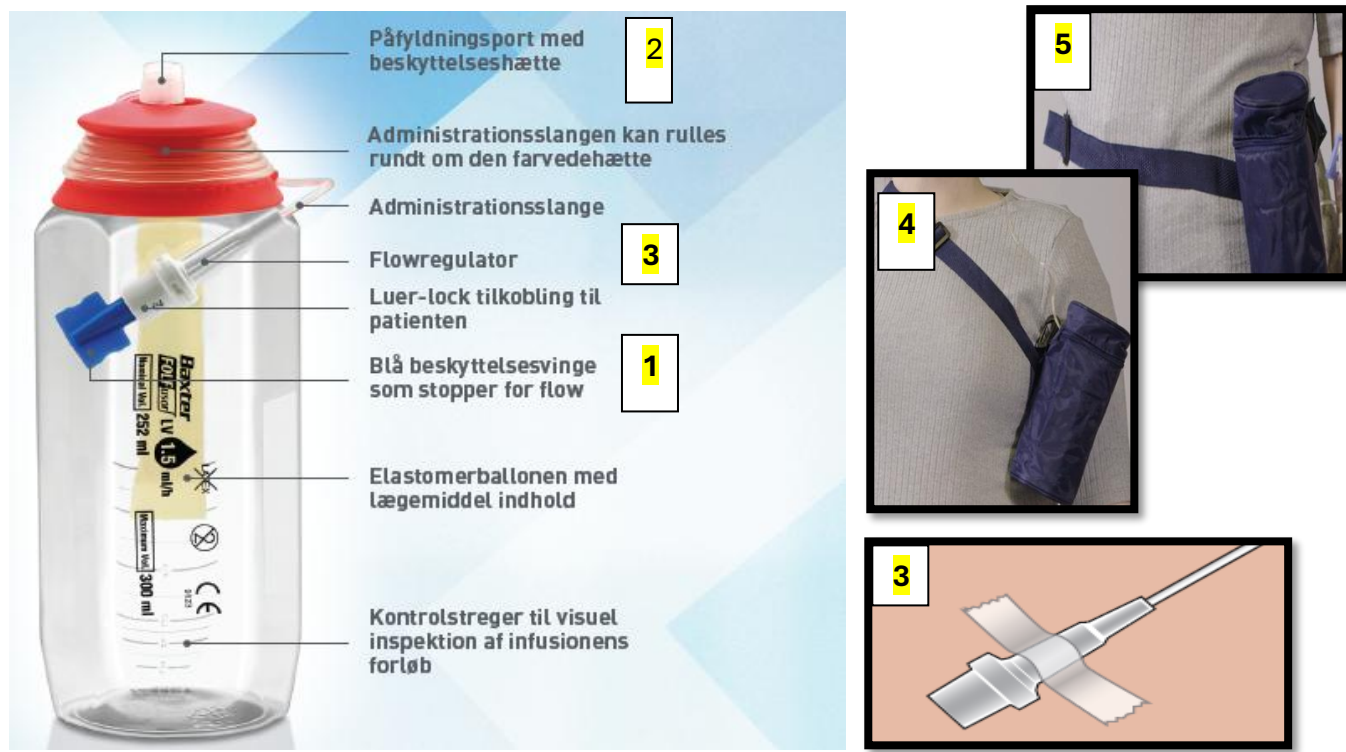

- 1) **Priming med NaCl.** Ved priming med NaCl fyldes slangen til patienttilkoblingen **ikke** automatisk.

Håndtering: I skal efter priming af de 10 ml NaCl åbne for den blå vinge og afvente at NaCl har primet hele slangen (se billede, blå beskyttelsesvinge: 1). Løber der ikke væske ud påsættes en tom sprøjte og trækkes NaCl ud i Slangen). Vingen **skal** sættes på igen efter priming (hvis du har brug for at lægge vingen fra dig under priming, så placer den i en steril udpakning).

- 2) **Påfyldningsprop.** Gem den lille prop fra påfyldningsporten og sæt den på igen efter fyldning.
- 3) **Fixering af flowregulator.** Baxterpumpen har en plastik flowregulator der skal fixeres mod huden. (se billede: Flowregulator:3)
- 4) **Bæltetaske til Baxter-pumpe.** Kan bæres som skuldertaske (4) og bæltetaske (5). Det anbefales at anvende tasken, så pumpen er så tæt på højde for IV-adgang som muligt.
- 5) **Aftagning af pumpe.** Der er **ikke** en klem-skrue på slangen. Når pumpen tages af sættes/skrues patienttilkoblingen på påfyldningsporten (så løber der ikke restmedicin ud i affaldsposen)